

HOCHWIRKSAME FLÄCHENDESINFEKTION

Schnell und schonend desinfizieren

*Bewährte Rezeptur,
neues Design*



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

Hochwirksame Desinfektionstücher aus PET- oder Bio-Vlies

- Vliestuch zu 100 % abbaubar¹ und aus nachwachsenden Rohstoffen
- Strukturiertes Vliesmaterial verbessert die Saugfähigkeit
- Einfache Entnahme mit wiederverschließbarem Deckel



Haltbarkeit
nach Anbruch:
42 Tage

PRESERVE

Unsere **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** bieten eine schnelle und unkomplizierte Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Sie sind durch ihre schnelle Wirksamkeit und sehr gute Haut- und Materialverträglichkeit besonders für den Einsatz in patienten-

nahen Bereichen geeignet. **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** gibt es im 60er Flowpack mit PET-Vliestuchmaterial und im 100er Flowpack mit unseren Bio-Wipes. Die Tücher lassen sich ganz einfach einzeln aus der praktischen Packung mit dem wiederverschließbaren Deckel entnehmen.



Nachhaltigkeit und Effizienz

Das zu 100 % biologisch abbaubare Vliesmaterial unserer **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** im 100er Flowpack überzeugt nicht nur durch seine Nachhaltigkeit, sondern auch durch eine verbesserte Reichweite gegenüber PET-Vliesstoffen. Außerdem gewährleistet die verbesserte Oberflächenstruktur eine noch bessere Reinigungsleistung.

Patenterte Innovation

Unsere patentierte Faltechnologie ermöglicht eine schnelle und einfache Entnahme einzelner Tücher und hilft dabei, die Nutzung der **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** noch effizienter zu gestalten. Sie kommt sowohl bei unseren PET-Tüchern als auch bei unseren verbesserten Bio-Wipes zum Einsatz.



¹Die biologische Abbaubarkeit unserer Vliesstoffe ist zertifiziert nach der Europäischen Norm EN 13432.

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL

Extragroße Desinfektionstücher im praktischen Standbodenbeutel

- **Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung**
- **Schnelle und umfassende Wirksamkeit**
- **Besonders geeignet zur Desinfektion von großen Flächen in patientennahen Bereichen**

Auch unsere **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL** garantieren eine universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung. Durch die größeren Tücher sind sie besonders für die Desinfektion von großen Flächen in patientennahen Bereichen geeignet. Die bewährte Formulierung der verwendeten Tränkflüssigkeit ermöglicht eine schnelle und umfassende Wirksamkeit.

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL helfen dabei, CO₂-Emissionen zu reduzieren und Ressourcen zu sparen. Die vorgetränkten Beutel senken den Logistikaufwand, da keine separate Tränkflüssigkeit transportiert werden muss. Dadurch wird Kunststoff, der für die Herstellung der Kanister benötigt wird, eingespart. Sobald die **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL** aufgebraucht sind, kann die Verpackung ganz einfach komprimiert werden und ermöglicht so eine effizientere Entsorgung.

Anwender:innen unserer **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL** profitieren auch durch eine Zeitersparnis im Einsatz. Durch das vorgetränkte Vliesmaterial fällt das Befüllen und die Einwirkzeit der Tränkflüssigkeit weg und die Tücher können sofort nach Anbruch der Verpackung verwendet werden.



PRESERVE



Innerhalb kürzester Zeit umfassend wirksam

Ein Schnelldesinfektionsmittel, das seinen Namen auch verdient.
Die schnell wirkende Formel der Dr. Schumacher Produkte
DESCOCEPT SENSITIVE und **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES**
sorgt für kurze Einwirkzeiten bei allen relevanten Wirkungsspektren.



BAKTERIZID / LEVUROZID
VAH / EN 16615

2 min

NOROVIREN
EN 14476

ab 30 s

ADENOVIREN
EN 14476

3 min

BEGRENZT VIRUZID
EN 14476

1 min

TUBERKULOZID
EN 14348

1 min

BEGRENZT VIRUZID PLUS
EN 14476

3 min

IHO

VAH

ÖGHMP



Ihr PLUS für die Praxis

In 3 Minuten begrenzt viruzid PLUS

DESCOCEPT SENSITIVE und **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES**

wirken nach EN 14476 bereits innerhalb von 3 Minuten begrenzt viruzid PLUS. Auch bei allen anderen Wirkungsspektren punktet die intelligent abgestimmte, niedrigalkoholische Rezeptur mit kurzen Einwirkzeiten.

So profitieren Sie von den schnellen Einwirkzeiten:

1. Hohe Patientensicherheit

Nach EN 14476 und/oder EN 16777 muss die Viruswirksamkeit gegen Noroviren (MNV) und Adenoviren innerhalb von maximal 5 Minuten gegeben sein.* Eine längere Einwirkzeit ist nicht normenkonform. Mit ihrer Wirksamkeit in 3 Minuten erfüllen **DESCOCEPT SENSITIVE** und **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** die Anforderungen. Die Produkte eignen sich daher optimal für die Desinfektion.

2. Sehr guter Anwenderkomfort

Die kurzen Einwirkzeiten erlauben eine schnelle Flächendesinfektion. Es kommt zu keinen Verzögerungen der Abläufe – auch wenn Einwirkzeiten einzuhalten sind.

3. Umfassendes Wirkungsspektrum

Mit dem Wirkungsspektrum begrenzt viruzid PLUS ist ein Produktwechsel beim Auftreten von Noro- und Adenoviren nicht erforderlich. Außerdem eignet sich das Produkt zum Einsatz bei Patienten mit Tuberkulose.

4. Lange Standzeit

Die außergewöhnlich hohe Standzeit von bis zu 42 Tagen gewährleistet eine besonders lange Verwendbarkeit unserer **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** – unabhängig von der Größe oder dem Material des Tuchs.



* Produkte, die zur Desinfektion von Oberflächen vorgesehen sind, die wahrscheinlich mit dem Patienten und/oder dem medizinischen Personal in Kontakt kommen, und Oberflächen, die häufig von verschiedenen Personen berührt werden, was zu einer Übertragung von Mikroorganismen auf den Patienten führt, sind mit einer Einwirkzeit von höchstens 5 min zu prüfen.

Schonend zum Material

DESCOCEPT SENSITIVE und **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES**

sind bestens für den Einsatz auf empfindlichen Flächen geeignet. Die niedrigalkoholische Rezeptur ist speziell auf die Anforderungen der Desinfektion unterschiedlichster, vor allem auch sensibler Materialien abgestimmt. Das ist gerade bei der Desinfektion digitaler Endgeräte

wichtig. Denn Tablets, Monitore & Co. stellen erhöhte Ansprüche an die Materialverträglichkeit von Desinfektionsmitteln. Selbstverständlich lassen sich auch die Oberflächen anderer Gegenstände wie z. B. Nachtische, Bettgestelle oder Arbeitsflächen mit **DESCOCEPT SENSITIVE** und **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** bedenkenlos desinfizieren.

Auch für den Lebensmittelbereich

Die Schnelldesinfektionsmittel **DESCOCEPT SENSITIVE** und **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** sind auch für den Lebensmittelbereich geeignet, z. B. für Tablets, Medikamenten- und Stationskühlschränke.




Auf nahezu jedem Material* einsetzbar:

ARBEITSFLÄCHEN



MONITORE

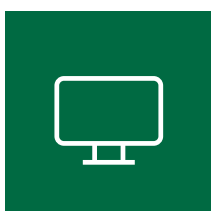


BLUTDRUCK-
MANSCHETTEN



STETHOSKOPE



BEDIENFELDER

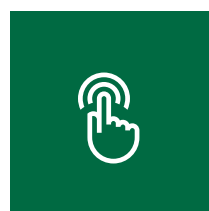

TÜRGRIFFE



Verträglich zur Haut

Note „sehr gut“: Das ist das Ergebnis der dermatologischen Prüfungen von **DESCOCEPT SENSITIVE** durch das unabhängige Institut Dermatetest.* Durchgeführt wurden die Prüfungen am Menschen unter

fachärztlicher Kontrolle. Dabei zeigte sich: Im offenen Epikutantest nach internationalen Richtlinien traten keine toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.



Die hautverträgliche Rezeptur im Detail:



- **Frei von Parfüm und Farbstoffen**
- **Konzentration auf den bewährten Wirkstoff Ethanol**
- **Ausgewählte, milde Tenside**
- **Keine zusätzlichen Desinfektionswirkstoffe, wie z. B. Amine**
- **Ohne Handschuhe anwendbar****

* Zertifikat kann bei der Dr. Schumacher GmbH angefordert werden

** Sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

Wirksamkeiten auf einen Blick:

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			30 s	1 min	2 min	3 min
Anwendungsempfehlungen zur Flächendesinfektion						
bakterizid, levurozid*/**	EN 16615	hohe Belastung, mit Mechanik			•	
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	hohe und niedrige Belastung		•		
mykobakterizid (M. avium, M. terrae)	EN 14348	hohe und niedrige Belastung			•	
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	hohe und niedrige Belastung				•
begrenzt viruzid	EN 14476	hohe und niedrige Belastung		•		
Ergänzende Prüfergebnisse						
bakterizid	EN 16615	hohe Belastung			•	
	EN 13697	hohe und niedrige Belastung		•		
	EN 13727	hohe Belastung		•		
	EN 1276	hohe Belastung		•		
levurozid (C. albicans)	EN 16615	hohe Belastung			•	
	EN 13697	hohe und niedrige Belastung		•		
	EN 13624	hohe Belastung		•		
	EN 1650	hohe Belastung		•		
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung		•		
		hohe Belastung	•			
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV / HIV / HCV	•			
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige Belastung	•			
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	hohe und niedrige Belastung				•
wirksam gegen Coronaviren	EN 14476	hohe Belastung	•			

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)
** VAH-gelistet 5 Min.-Wert

Bestellinformationen

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Größe	Art. Nr.	PZN
DESCOSEPT SENSITIVE	Flasche	20	500 ml		00-323DS-005	16943815
	Sprühflasche	6	750 ml		00-323DS-0075-02	15573227
	Flasche	10	1 L		00-323DS-010	15573233
	Kanister	3	2,5 L		00-323DS-025	17397869
	Kanister	3	5 L		00-323DS-050	15573196
	Kanister	1	10 L		00-323DS-100	15573204
DESCOSEPT SENSITIVE WIPES	Packung	9	60 Blatt	20 x 22 cm	00-323DS-To60	17195976
DESCOSEPT SENSITIVE WIPES BIO-VLIES	Packung	6	100 Blatt	20 x 20 cm	00-323DS-T100	14307328
DESCOSEPT SENSITIVE WIPES XL	Packung	4	120 Blatt	17,5 x 36 cm	00-323DS-OSEB120	18386833