

Betriebsanleitung

Dosierspender SPE ALU FLEX aus Aluminium für Desinfektionsmittel, Flüssigseifen und -lotionen, Pumpenfrontentnahme

Verwendbar mit 500 ml und 1 L Flaschen sowie dem 700 ml ESH Vacu-Bag.

Vor der Montage beachten:

Packen Sie den Karton aus und achten Sie darauf, dass folgende Teile enthalten sind:


- 1 Spendergehäuse (Aluminium)
- 1 Pumpenblende (Kunststoff) mit Armhebel (Edelstahl)
- 1 Wandmontageplatte
- 1 Flaschenfeststeller (Kunststoff) inkl. Schlüssel (D1) für Pumpenblende (Edelstahl)
- 1 Beutel mit je drei Schrauben, Beilagscheiben und Dübel
- 1 Bedienungsanleitung DE|EN

Darüber hinaus ist für den Betrieb des Spenders entweder eine Einweg-Kunststoffpumpe oder ein Adapter zum Einsetzen des ESH Vacu-Bags notwendig.

Wandspender & Zubehör	Art. Nr.
SPE ALU FLEX	
Wandspender	00-907-KOMB
ESH-Adapter für SPE ALU FLEX	00-907-KOMB-01
Verschlussblende für SPE ALU FLEX	00-907-KOMB-02
Flaschenklemme für 500 ml Flaschen	00-907-KOMB-03
Einweg-Kunststoffpumpe für SPE, 500ml	00-918-105
Einweg-Kunststoffpumpe für SPE, 1 L	00-918-110
Tropfschalenwinkel	00-907-KOMB-04
Tropfschale weiß, universell	00-918-205
Tropfschale grün, Waschlotion	00-918-205GR
Tropfschale blau, Händedesinfektion	00-918-205BL
Tropfschale gelb, Hautpflege	00-918-205GE
Tropfschale rot, Hautschutz	00-918-205RO
Bohrschablone	ZUB-907000

Übersicht der Einzelteile


- A Spendergehäuse
- B Pumpenblende mit Armhebel
- B1 Schlüsselöffnung
- C Wandmontageplatte
- D Flaschenfeststeller inkl. Schlüssel (D1) für Pumpenblende
- E Flaschenklemme (500 ml)
- F Tropfschalenwinkel
- G ESH-Adapter für SPE ALU FLEX
- H Tropfschale
- I Verschlussblende

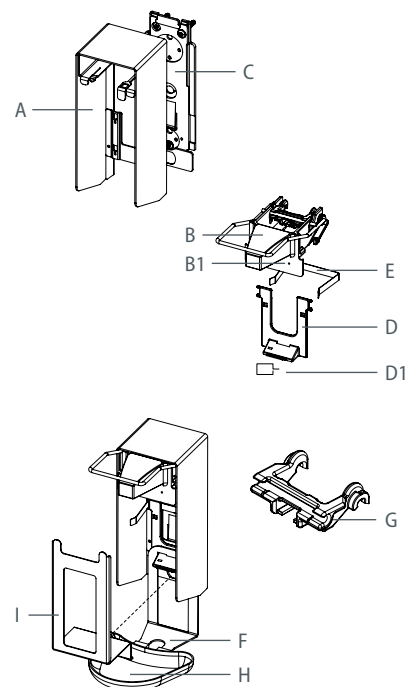

Hinweise zur Spendermontage


Sie benötigen eine Bohrmaschine und einen 6 mm-Bohrer sowie einen Schraubendreher oder Akkuschrauber. Bei Bedarf steht eine Bohrschablone zur Verfügung, die die notwendigen Abstände bei Nutzung mehrerer Spender mit Tropfschalen vorgibt.

- Wandmontageplatte mit Dübeln, Beilagscheiben und Schrauben an der Wand befestigen
- Höhenempfehlung: Die Spenderoberkante sollte ca. 130 cm über dem Fußboden liegen
- Spender von oben über die Wandmontageplatte schieben, bis die Verriegelungszunge hörbar einrastet

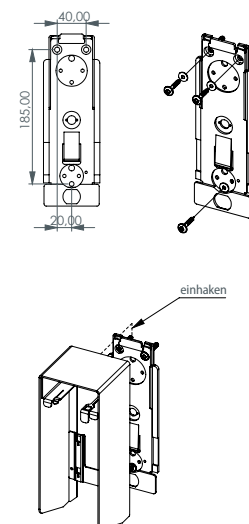

1 Inbetriebnahme

Der Flaschenfeststeller wird für die 500 ml und 700 ml in die oberen Löcher eingehängt, für die 1000 ml Gebinde in die unteren Löcher. Optional kann die Flaschenklemme zur Stabilisierung der 500 ml Flasche an den Flaschenfeststeller eingeklippt werden. Dies muss vor dem Einhängen des Flaschenfeststellers in das Gehäuse passieren. Optional die Tropfschale auf die Tropfschalhalterung stecken und diese in den Flaschenfeststeller einhängen.

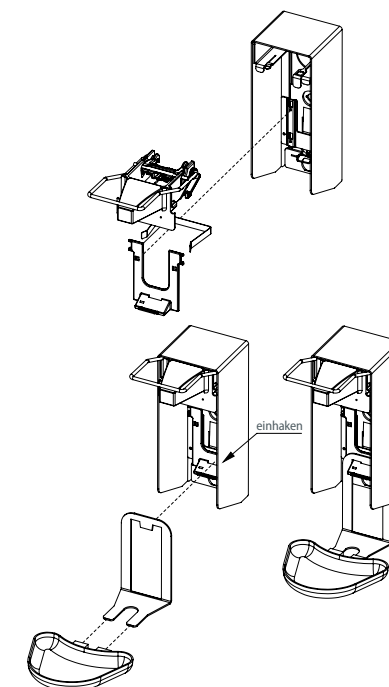


Betriebsanleitung

Dosierspender SPE ALU FLEX aus Aluminium für Desinfektionsmittel, Flüssigseifen und -lotionen, Pumpenfrontentnahme


② Verwendung von Flaschen und Pumpen: Dosierung – Flaschen-austausch

Die Pumpe in die Pumpenblende von hinten unter den Armhebel einschieben, bis sie hörbar einrastet. Die Einweg-Kunststoffpumpe ist bei Lieferung auf die max. Dosiermenge von 1,8 ml pro Hub eingestellt. Bitte bei Verwendung von dickflüssigen Medien nur mit der Maximaleinstellung (Dosiermenge 1,8 ml) anpumpen! Durch Verschieben der Dosiergabel nach rechts oder links lässt sich die Menge auf 1,2 ml bzw. 0,8 ml je Hub reduzieren. Zum Flaschentauch bzw. Erstbefüllung Verschlussblende öffnen, leere Flasche nach vorne ziehen und entnehmen, neue Flasche von unten über das Steigrohr der Spenderpumpe schieben und auf den Flaschenfeststeller aufsetzen. Ggfs. mit Verschlussblende verschließen. (Die Verschlussblende ist nur für 500 ml Flasche sowie für 700 ml ESH Vacu-Bag einsetzbar).

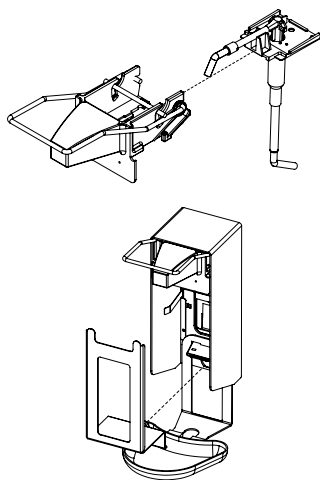


③ Verwendung des ESH Vacu-Bags

Den Adapter mit der breiten Seite von hinten an die Querstange des Hebels einklippen. Die Arme des Adapters vor dem Einschieben des Vacu-Bags nach oben kippen. Den Vacu-Bag von hinten unter den Hebel in die Pumpenblende einschieben. Bitte darauf achten, dass der Pumpenkopf vollständig ausgefahren ist. Die Arme des Adapters wieder nach unten kippen, dabei die Zangen in den Pumpenkopf einklippen, anschließend die Pumpenblende in das obere Schubfach des Gehäuses einschieben, bis sie hörbar einrastet. Ggfs. mit optionaler Verschlussblende verschließen.

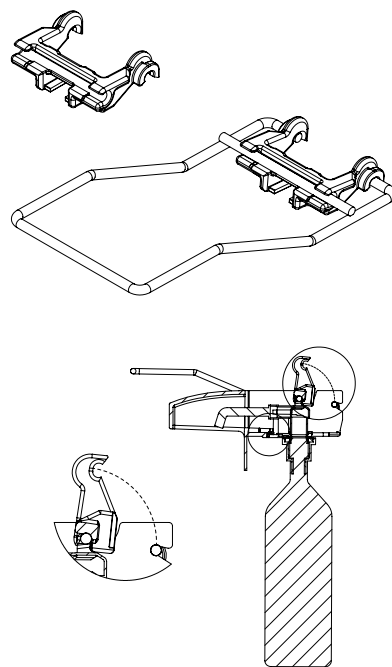

④ Wechsel von Pumpe/ESH Vacu-Bag

Pumpenblende mit Hilfe des Schlüssels lösen. Schlüssel in das dafür vorgesehene Loch vorne rechts in die Pumpenblende drücken, bis sich die Pumpenblende löst. Pumpenblende nach vorne herausziehen. Alte Pumpe bzw. entleerten Vacu-Bag nach hinten entnehmen. Beim Vacu-Bag muss dafür der Adapter vorher entriegelt/nach oben gekippt werden. Neue Pumpe bzw. Vacu-Bag einsetzen und die Pumpenblende wieder in das Gehäuse einstecken.

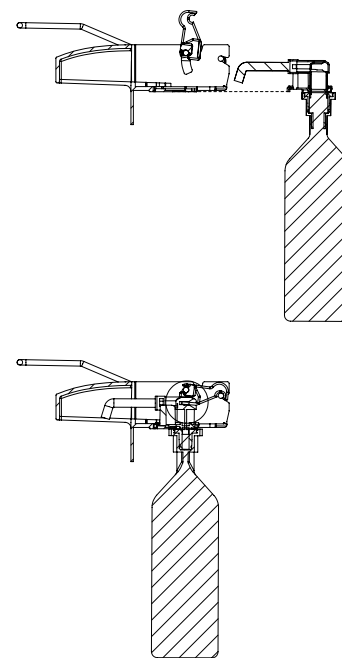

⑤ Anpumpen

Den Bedienhebel mehrmals bis zum Anschlag niederdrücken, bis an der Pumpendüse Flüssigkeit austritt. Bei Verwendung von dickflüssigen Gels, Seifen oder Lotionen den Hebel bis zu 10 x kräftig drücken, bis das Produkt austritt! Bei Problemen zuerst dünnflüssige (z.B. Wasser), dann erst dickflüssige Flüssigkeit ansaugen.

⑥ Reinigung des Spenders

Der Spender sollte gem. der Empfehlungen zur Infektionsvorsorge und Hygiene regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Dazu Gehäuse nur mit milden Reinigungsmitteln säubern, bei Bedarf mit Flächendesinfektionsmittel, z.B. DESCOSCEPT SENSITIVE WIPES nachbehandeln.

Bei Nutzung von Flaschen und Einwegpumpen: Aus hygienischen Aspekten ist die Spenderpumpe als Einwegpumpe ausgelegt, die in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden sollte.