

Anleitung

Arbeitsanweisung zur manuellen Aufbereitung des berührungslosen Kunststoffspenders RX5T

Laut des Robert Koch-Instituts (Richtlinie „Händehygiene“) kann eine unzureichende Spenderhygiene insbesondere bei Einsatz von Waschlotionen zu Keimbeseidlung von Spendersystem und Produkt führen. Der Umfang und die Häufigkeit der Reinigung und Desinfektion des Dosierspendergehäuses und der Dosierpumpe muss in hauseigenen Hygieneplänen festgelegt werden. **Wir empfehlen Ihnen folgende Aufbereitungsintervalle:**

Bei dem Einsatz von Händedesinfektionsmitteln:

- Spenderaufbereitung zweimal pro Jahr (halbjährlich).

Bei dem Einsatz von Waschlotionen:

- Spenderaufbereitung bei jedem Gebindewechsel.

ACHTUNG:

Bei der Spenderaufbereitung gilt „Personalschutz mit potenziell kontaminiertem Material“. Daher für die Spenderaufbereitung unbedingt Handschuhe tragen.

Vorbereitung:


Folgende Materialien bereitstellen:

- (fusselfreie) Einmaltücher
- Desinfektionstücher (DESCOCEPT PUR WIPES, DESCOCEPT SENSITIVE WIPES)
- Evtl. Reinigungsbürste

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Vorgehensweise

①

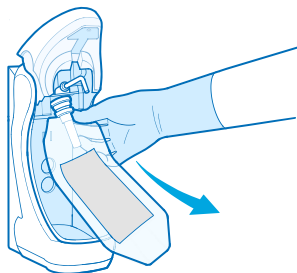

Zur Entnahme des Gebindes zuerst die Abtropfschale entfernen. Die Produktflasche / den ESH Vacu-Bag aus dem Spender entnehmen, Einmaltuch unter die Pumpe halten, um ein Heruntertropfen der Produktreste zu verhindern. Batteriefach auf der Unterseite des Spenders öffnen und die Batterien entnehmen.


②

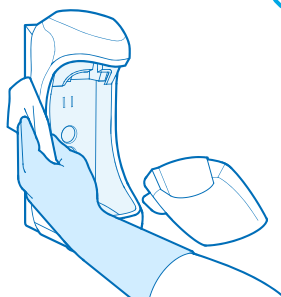

Das Spendergehäuse, die Spenderrückwand, die Abtropfschale sowie alle äußeren Oberflächen mit einem feuchten (fusselfreien) Einmaltuch reinigen. Die Oberflächen mit einem Schnelldesinfektionsmittel desinfizieren und die Einwirkzeit einhalten. (DESCOCEPT PUR WIPES, DESCOCEPT SENSITIVE WIPES). Den Sensor mithilfe einer Bürste reinigen, um mögliche Rückstände zu entfernen



③

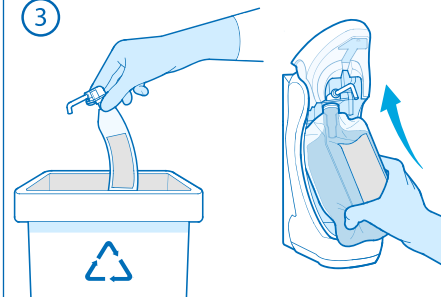

**Bei Nutzung von Einwegpumpen/
ESH Vacu-Bags:**

Pumpe/ESH Vacu-Bag verwerfen, neue Pumpe und neues Gebinde oder ESH Vacu-Bag einbringen und anpumpen.

Bei Nutzung von Mehrwegpumpen:

Pumpenaufbereitung gemäß Herstelleranleitung durchführen und mit Einmaltüchern abtrocknen.