

Anleitung

Arbeitsanweisung zur manuellen Spenderaufbereitung von Armhebelwandspendern SPE ALU FLEX

Laut des Robert Koch-Instituts (Richtlinie „Händehygiene“) kann eine unzureichende Spenderhygiene insbesondere bei Einsatz von Waschlotionen zu Keimbeseidlungen von Spendersystem und Produkt führen. Der Umfang und die Häufigkeit der Reinigung und Desinfektion des Dosierspendergehäuses und der Dosierpumpe muss in hauseigenen Hygieneplänen festgelegt werden.

Wir empfehlen Ihnen folgende Aufbereitungsintervalle:

Bei dem Einsatz von Händedesinfektionsmittel:

- Spenderaufbereitung zweimal pro Jahr (halbjährlich).

Bei dem Einsatz von Waschlotionen:

- Spenderaufbereitung bei jedem Gebindewechsel.

ACHTUNG:

Bei der Spenderaufbereitung gilt „Personalschutz mit potenziell kontaminiertem Material“. Daher für die Spenderaufbereitung unbedingt Handschuhe tragen.


Vorbereitung:

Folgende Materialien bereitstellen:


- (fusselfreie) Einmaltücher
- Auffangbehälter mit kaltem Wasser
- Gefäß mit heißem Wasser (ca. 250 ml)
- Desinfektionstücher (DESCOCEPT PUR WIPES, DESCOCEPT SENSITIVE WIPES)
- Desinfektionslösung (DESCOCEPT PUR / SENSITIVE)
- Evtl. Reinigungsbürste

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Vorgehensweise

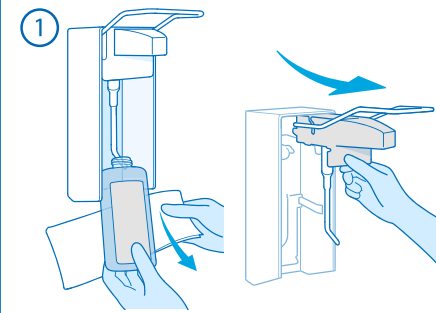

Die Produktflasche aus dem Spender entfernen. Einmaltuch unter die Pumpe halten, um ein Heruntertropfen der Produktreste zu verhindern. Pumpenblende mithilfe des Schlüssels entriegeln und nach vorne aus dem Spendergehäuse entnehmen. Pumpe auf der Rückseite der Pumpenblende entnehmen und auf eine Unterlage (Einmaltuch, Waschbecken etc.) ablegen.

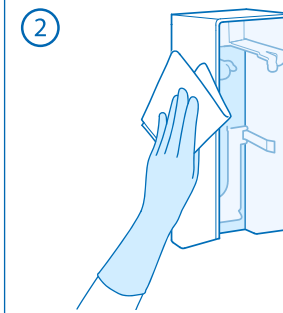


Das Spendergehäuse, die Pumpenblende und die Spenderrückwand, sowie alle äußeren Oberflächen mit einem feuchten (fusselfreien) Einmaltuch reinigen. Diese Oberflächen mit einem Schnelldesinfektionsmittel desinfizieren und die Einwirkzeit einhalten. (DESCOCEPT PUR WIPES, DESCOCEPT SENSITIVE WIPES).

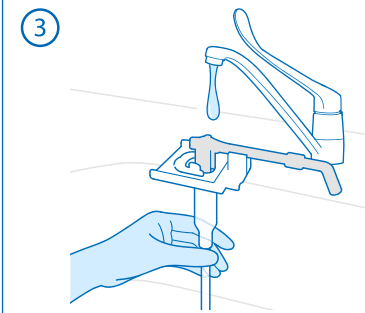

Bei Nutzung von Einwegpumpen/ESH Vacu-Bags: Pumpe/ESH Vacu-Bag verwerfen, neue Pumpe sowie neues Gebinde einbringen und anpumpen. Die folgenden Schritte 4 – 8 entfallen.
Bei Nutzung von Mehrwegpumpen: Die Pumpe mit einer Bürste unter fließend heißem Wasser gründlich reinigen. Bei schwierigen Verschmutzungen Reinigungsbürste verwenden. Dabei im Besonderen auf den Pumpenauslauf und die Gewinde achten. Anschließend Pumpe mit heißem Wasser über dem Waschbecken durchspülen.

Reinigung

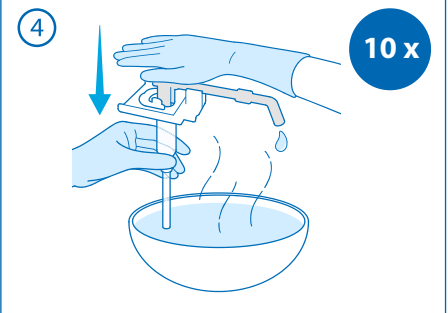


Schritt 1: Ein Gefäß mit heißem Wasser unter den Ansaugstutzen der Pumpe halten und 10 x pumpen. (Pumpe ohne eigene Federkraft muss von Hand angehoben werden)


Schritt 2: Anschließend ohne Wassergefäß Pumpe leer pumpen.

Schritt 1 und 2 wiederholen.


Desinfektion der Pumpe

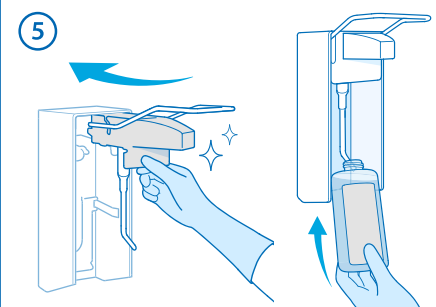


Schritt 1: Pumpe wieder in die Pumpenblende einführen und beides gemeinsam in den Spender einbauen. Eine Flasche mit alkoholischen Schnell-Desinfektionsmittel (DESCOCEPT PUR) einsetzen.

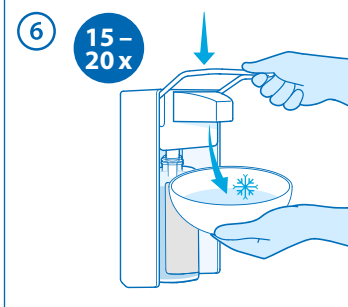

Anschließend die Pumpe 15 – 20 x betätigen und Reste in einem Auffangbehälter mit kaltem Wasser auffangen. Auf die produkt-spezifischen Einwirkzeiten ist zu achten.

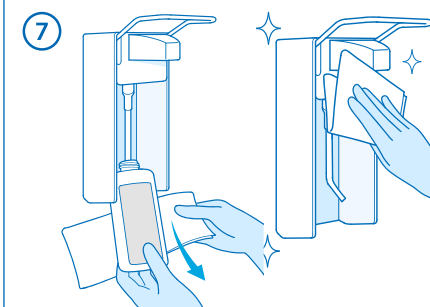

Schritt 2: Nach vollendeter Einwirkzeit Desinfektionslösung entfernen und die Pumpe leer pumpen. Die Reste in einem Auffangbehälter auffangen. Pumpe mit einem fusselfreien Einmaltuch abwischen.

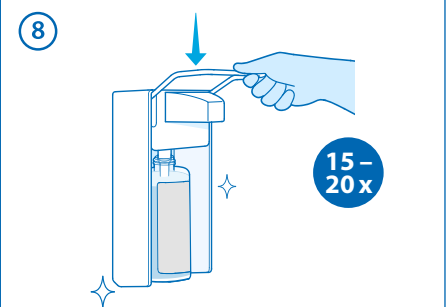

Ein neues Produktgebinde in den Spender einhängen und das neue Produkt mehrmals (15 – 20 x) in den Auffangbehälter pumpen. Die im Auffangbehälter aufgefangenen Reste können über das Abwassersystem entsorgt werden.