

ULTRASOL® ACTIVE Dosiertabelle

Lösung	0,5 %	1,0 %	2,0 %
4 Liter	1 x 	2 x 	4 x 
		1 x 	2 x 
8 Liter	2 x 	4 x 	8 x 
	1 x 	2 x 	4 x 
12 Liter	3 x 	6 x 	12 x 
		3 x 	6 x 

Legende:

1 x  = 20 g 1 x  = 40 g

Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.
Sachtet	100	40 g	00-255-0004
Dose	6	1 kg	00-255-010

Prevent – begrenzt viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Preserve** – begrenzt viruzid plus sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Protect** – viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Ansetzen der Gebrauchslösung

1. Konzentration und Menge in der Dosiertabelle ablesen.
2. Benötigte Menge Wasser einfüllen.
3. Angegebene Menge ULTRASOL ACTIVE ins Wasser geben.
4. Mehrmals umrühren und Pulver innerhalb von 15 Min auflösen.
5. Die Lösung ist nach 15 Min einsetzbar.

Hinweise zur Gebrauchslösung

- Lösung immer frisch vor Einsatz ansetzen.
- Empfohlene Methode: Scheuer-Wisch-Desinfektion, Zwei-Eimer-Methode.
- Lüften Sie ausreichend bei der Anwendung der Gebrauchslösung.
- Die Gebrauchslösung ist nach Ansetzen maximal 24 Stunden zu verwenden. Dies ist auch in der Kombination mit Vliestuch-Spendersystemen einzuhalten.

Wirkpektrum und Einwirkzeiten (Auszug)

Anwendungsempfehlung zur tuberkuloziden Flächendesinfektion	2 % – 15 min 1 % – 60 min
Anwendungsempfehlung zur sporiziden Flächendesinfektion gegen C. diff. Ro27 im humanmedizinischen Bereich	1,5 % - 5 min 1 % – 15 min
Anwendungsempfehlung zur sporiziden (B. subtilis, B. cereus) Flächendesinfektion	2 % – 15 min 1 % – 30 min

Wirkpektrum und Einwirkzeiten (Hygienelevel)

	PREVENT	PRESERVE	PROTECT
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion	1 % – 5 min 0,5 % – 15 min	1 % – 5 min 0,5 % – 15 min	2 % – 15 min 1 % – 60 min

Zusammensetzung – 100 g Lösung enthalten

Wirkstoff: > 750 ppm Peressigsäure, hergestellt aus Tetraacetylthylendiamin (250 g/kg) und Natriumpercarbonat (450 g/kg). Der Wirkstoff wird bei Lösen des Produkts in Wasser gebildet (in-situ, 10 g/l für 1 %ige Lösung).