

Arbeitsanleitung

Befüllung von **one system basic**



Bei der Verwendung von ONE SYSTEM BASIC Vliestuchspendern zur Flächendesinfektion sind die grundsätzlichen hygienischen Standards zu berücksichtigen. Zur Befüllung des Vliestuchspenders und im Umgang mit Desinfektionsmitteln sind geltende Regeln des Personalschutzes zu beachten und geeignete Schutzausrüstung zu tragen (siehe BGR 250 / BGR 195 / BGR 206; Infos unter www.bgw-online.de).


Mit den folgenden Dr. Schumacher Flächendesinfektionsmitteln wurde eine Standzeit von 42 Tagen bestätigt:
CLEANISEPT, OPTISAL PLUS, OPTISAL N, BIGUANID FLÄCHE NR, DESCOSEPT SENSITIVE

MIT ULTRASOL OXY: 60 Tage

Bei Verwendung von anderen geeigneten Produkten: Maximale Standzeit von 28 Tagen oder gemäß produktbezogener Herstellerangaben.


Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

①

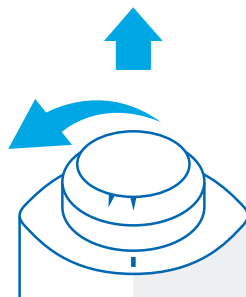


Den Deckel entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.

②

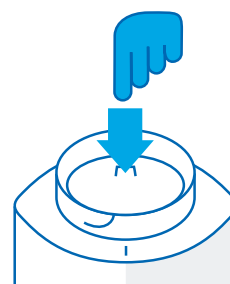

Die Membran an der Entnahmelasche eindrücken.

③

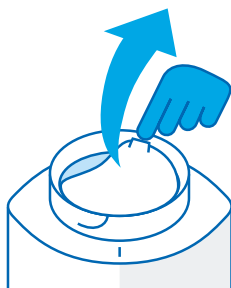

Die eingedrückte Membran an der Entnahmelasche fassen und entfernen.

④



***ULTRASOL OXY: 2 L**


Die bereits enthaltene Vliestuchrolle mit 2,5 L gebrauchsfertiger Desinfektionsmittellösung tränken.

⑤




Das erste Tuch durch die sternförmige Entnahmeöffnung des Deckels ziehen.

⑥

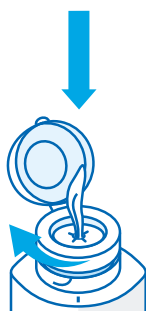


Den Deckel im Uhrzeigersinn drehen und das System verschließen.

⑦

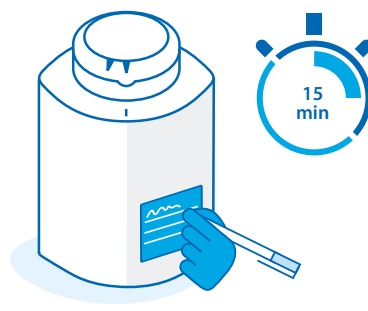

Nach 15 Minuten Vortränkzeit können die Tücher benutzt werden. Den Beutel mit den Ansatzinformationen vollständig beschriften.
Wichtig: Nach jedem Gebrauch Spender wieder verschließen.

⑧

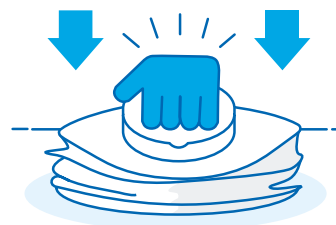

Einwegsystem! Eventuelle Restflüssigkeit entsorgen, den Spender mit offenem Deckel zusammenpressen und dem Recycling zuführen.