

Arbeitsanleitung

Befüllung von **one system⁺PLUS**




Bei der Verwendung von Feuchttuchspendern zur Flächendesinfektion sind die grundsätzlichen hygienischen Standards zu berücksichtigen. Zum Arbeitsschutz des Anwenders empfehlen wir, chemikaliendichte Schutzhandschuhe zu tragen. Mit den folgenden Produkten kann, bei korrekter Handhabung, eine Standzeit von 42 Tagen erreicht werden: CLEANISEPT, OPTISAL PLUS, OPTISAL N, BIGUANID FLÄCHE NR, DESCOSEPT SENSITIVE. MIT ULTRASOL OXY: 60 Tage
Bei Verwendung von anderen geeigneten Produkten: Maximale Standzeit von 28 Tagen oder gemäß produktbezogener Herstellerangaben.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

①



Entnahmedeckel des Vliestuchspenders abschrauben. Mit der Oberseite auf eine saubere Fläche legen.

②

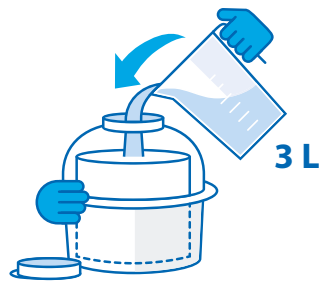

Die bereits enthaltene Vliestuchrolle mit 3 L gebrauchsfertiger Desinfektionsmittel-lösung tränken.

③



Schutzdeckel des Entnahmedeckels öffnen.

④



Das erste Tuch aus der Mitte der Tuchrolle herausziehen.

⑤



Den vorderen Teil des Tuchs durch die stern-förmige Entnahmeöffnung im Entnahme-deckel ziehen.

⑥




Den Entnahmedeckel wieder aufschrauben und den Schutzdeckel schließen. Das herausgezogene Tuch muss vollständig vom Schutzdeckel umschlossen sein.

⑦



Das Dokumentationsfeld mit den Ansatz-informationen vollständig ausfüllen.

⑧

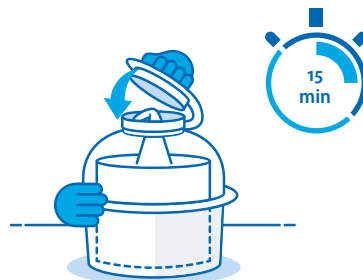

Nach 15 Minuten Vortränkzeit ist das System einsatzbereit. Wichtig: Nach Gebrauch Spender wieder verschließen.

⑨



Einwegsystem! Eventuelle Restflüssigkeit ent-sorgen, den Spender mit offenem Entnahme-deckel zusammenpressen und dem Recycling zuführen.