



Arbeitsanleitung

Befüllung von DESCO WIPES und ECO WIPES Vliestuchspender

Bei der Verwendung von DESCO WIPES und ECO WIPES Vliestuchspendersystemen zur Flächendesinfektion sind die grundsätzlichen hygienischen Standards zu berücksichtigen. Zur Befüllung des Vliestuchspenders und im Umgang mit Desinfektionsmitteln sind geltende Regeln des Personalschutzes zu beachten und geeignete Schutzausrüstung zu tragen (siehe BGR 250 / BGR 195 / BGR 206; Infos unter www.bgw-online.de).

Zur Verwendung mit gebrauchsfertigen oder nach Herstellerangaben angesetzten Desinfektionsmitteln.

Mit den folgenden Dr. Schumacher Flächendesinfektionsmitteln wurde eine Standzeit von 28 Tagen bestätigt: CLEANISEPT, OPTISAL PLUS, OPTISAL N, BIGUANID FLÄCHE NR, DESCOSEPT SENSITIVE, ULTRASOL OXY

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

①



Deckel des Vliestuchspenders entfernen und mit der Außenseite auf der Arbeitsfläche ablegen.

②



Trockene Vliestuchrolle aus der Verpackung nehmen und in den Spender einsetzen. **Alternative:** Bereits vorgetränkte Tücher mit dem Beutel einsetzen und mit Schritt 4 fortfahren.

③




Desinfektionsmittellösung langsam und spiralförmig über die Vliestuchrolle in den Spender füllen.

Dosieranleitung


Blatt/Rolle	50	70	100	120
Lösung	1,5 L	1,5 L	3,0 L	2,5 L

④

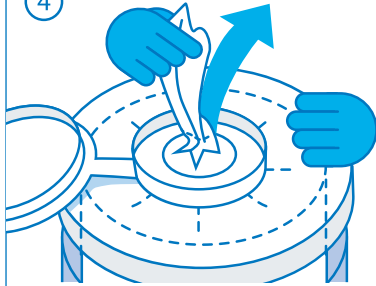

Erstes Vliestuch aus der Mitte der Tuchrolle herausziehen und den vorderen Teil des Tuches durch das sternförmige Entnahmesystem führen.

⑤

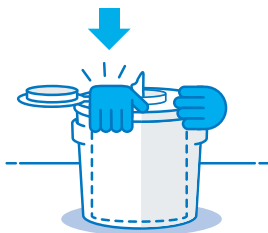


Vliestuchspender fest verschließen.

⑥



Beim Schließen der Entnahmeöffnung darauf achten, dass das herausgezogene Tuch vollständig vom Schutzdeckel umschlossen ist.

⑦

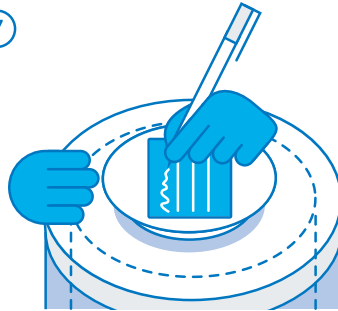

Beigefügtes Decketikett mit den Ansatzinformationen vollständig ausfüllen und auf dem Deckel anbringen.

⑧



Nach 30 Minuten sind die Tücher einsatzbereit. Das erste Tuch verworfen. Nach jedem Gebrauch Spender wieder verschließen.



Aufbereitung von DESCO WIPES und ECO WIPES Vliestuchspender mittels ULTRASOL OXY® SACHET

Vor jeder Wiederbefüllung eines DESCO WIPES und ECO WIPES Mehrweg-Vliestuchspenders ist eine vorbeugende Reinigung und Desinfektion erforderlich. Neben möglichen chemothermischen und thermischen Verfahren ist die manuelle Aufbereitung mittels ULTRASOL OXY Aufbereitungstüchern möglich. Jeder Nachfüllpackung liegen die ULTRASOL OXY Aufbereitungstücher bei. Es wird empfohlen, den Vliestuchspender vor der Aufbereitung einer visuellen Kontrolle zu unterziehen. Bei Abnutzungserscheinungen sind Deckel/Vliestuchspender auszutauschen. Zur Befüllung und Aufbereitung des Feuchttuchspenders und im Umgang mit Desinfektionsmitteln sind geltende Regeln des Personalschutzes zu beachten und geeignete Schutzausrüstung zu tragen (siehe BGR 250 / BGR 195 / BGR 206; Infos unter www.bgw-online.de). Die VAH-Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vortranksystem für die Flächendesinfektion¹ und die Mitteilung der VAH „Kontrollmaßnahmen bei der An-


wendung von Tuchspendersystemen für die Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil² sind zu beachten. Im Falle eines mikrobiologischen Befundes sind neben der Aufbereitung auch die Befüllung, Anwendung und ggf. weitere Parameter als mögliche Ursache in Betracht zu ziehen und zu überprüfen.

¹ Hyg Med 37. Jahrgang 2012, Mitteilung 3/2012 Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vortranksystem für die Flächendesinfektion


² Hyg Med 38. Jahrgang 2013, Mitteilung 1/2013 Kontrollmaßnahmen bei der Anwendung von, Tuchspendersystemen für die Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil

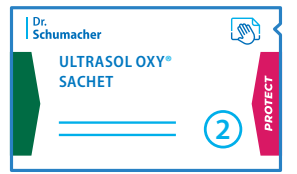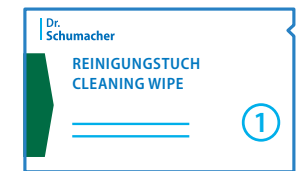

REINIGUNG ①

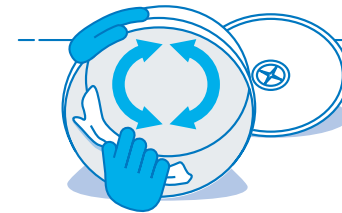

Innenseiten und Rand des neuen oder restentleerten Spenders mit dem Reinigungstuch gründlich reinigen.

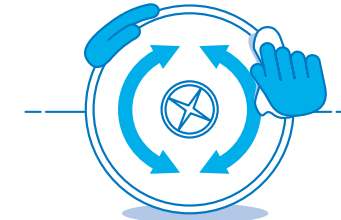


Deckelinnenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich reinigen.



Deckelaußenseiten und Außenflächen des Spenders gründlich reinigen.




DESINFEKTION ②

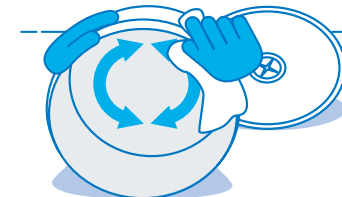

Innenseiten und Rand des Spenders mit dem Desinfektionstuch gründlich abwischen.



Deckelinnenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich abwischen.

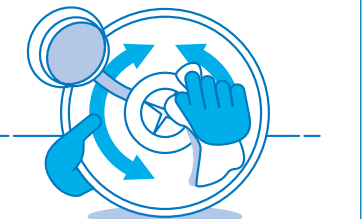

***Einwirkzeit beachten**

Deckelaußenseiten und Außenflächen des Spenders gründlich abwischen.

