


PERFEKTAN® ACTIVE Dosiertabelle

Lösung	1,0 %	2,0 %	3,0 %
4 Liter	40 g	80 g	120 g
	1 X 	2 X 	3 X 
	2 X 	4 X 	6 X 
8 Liter	80 g	160 g	240 g
	2 X 	4 X 	6 X 
	4 X 	8 X 	12 X 
12 Liter	120 g	240 g	360 g
	3 X 	6 X 	9 X 
	6 X 	12 X 	18 X 
20 Liter	200 g	400 g	600 g
	5 X 	10 X 	15 X 
	10 X 	20 X 	30 X 
28 Liter	280 g	560 g	840 g
	7 X 	14 X 	21 X 
	14 X 	28 X 	42 X 
40 Liter	400 g	800 g	1200 g
	10 X 	20 X 	30 X 
	20 X 	40 X 	60 X 

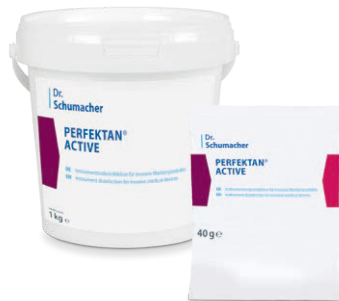

Ansetzen der Gebrauchslösung

1. Konzentration und Menge in der Dosiertabelle ablesen.
2. Benötigte Menge Wasser in geeigneter Qualität (z.B. VE-Wasser) unterhalb 30 °C einfüllen.
3. Angegebene Menge PERFEKTAN ACTIVE ins Wasser geben.
4. Mehrmals umrühren und Pulver innerhalb von 15 Min auflösen.
5. Die Lösung ist nach 15 Min einsetzbar.

Hinweise zur Gebrauchslösung

- Die Gebrauchslösung ist sofort bei sichtbarer Verschmutzung, mindestens jedoch arbeitstäglich (max. 12 Stunden), zu erneuern. PERFEKTAN ACTIVE darf nicht mit anderen Prozesschemikalien gemischt werden.
- Bei Anwendung der Gebrauchslösung auf ausreichende Belüftung achten

Legende:

1 X  = 20 g 1 X  = 40 g

Zusammensetzung

Wirkstoff: Peressigsäure (in-situ) > 850 ppm (1 %ige Lösung), Wasserstoffperoxid

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Sachet	100	40 g	10966229	00-155-0004
Eimer	6	1 kg	10966241	00-155-010