

FLÄCHENDESINFEKTION

Starke Leistung im Ausbruchsfall

Ab sofort im
neuen 40 g Sack



ULTRASOL® ACTIVE
Pulverkonzentrat zur Flächendesinfektion

PROTECT



Spitzenleistung gegen Sporen

*C. difficile-wirksam
ab 1,5% in 5 Min.¹*

VAH

ÖGHMP

RKI AB

RKI/DVV

IHO

ULTRASOL® ACTIVE

Hochwirksam und schnell einsetzbar – mit ULTRASOL ACTIVE hat die sporizide Flächendesinfektion die nächste Stufe erreicht. Widerstandsfähige Sporen von Clostridioides (C.) difficile werden innerhalb kürzester Einwirkzeiten effektiv inaktiviert – und das bei ausgezeichneter Materialverträglichkeit.

Sicherheit auf patienten- und bewohnernahen Flächen

Kurze Einwirkzeiten sind in der Flächendesinfektion entscheidend. Das gilt insbesondere für häufig berührte Flächen im direkten Umfeld von Patient:innen und Bewohner:innen. ULTRASOL ACTIVE ist die ideale Lösung für die sporizide Desinfektion dieser Flächen – RKI-Listung für die Bereiche A und B inklusive. Das leistungsstarke Pulverkonzentrat ist umfassend und schnell wirksam, materialschonend und sicher anzuwenden. ULTRASOL ACTIVE ist in der täglichen Praxis vielfältig einsetzbar und garantiert eine sichere Desinfektion.

Großes Sachet für schnelle Wirksamkeit

Das ULTRASOL ACTIVE Sachet ist ab sofort in der **40 g Packung** erhältlich.

Das erleichtert eine höhere Dosierung, die häufig eingesetzt wird.

Gleichzeitig reduzieren wir das Verpackungsmaterial, ohne die Sicherheit des Produktes zu verringern.

Ab sofort im
neuen 40 g Sachet

Starke Leistung auf einen Blick

- Sporizid wirksam gegen *C. difficile* und *C. difficile* Ribotyp Ro27 ab 1,5 % in 5 Min.¹
- Nach EN 17126 und EN 16615 (modifiziert)² getestet
- RKI-gelistet in den Wirkungsbereichen A und B
- Hervorragend materialverträglich
- Zuverlässig und sicher in der Anwendung



Neue Normen, starke Werte



Sporizidie nach EN 17126:

Von Patient:innen oder medizinischem Personal häufig berührte Flächen sind mit einer Einwirkzeit von höchstens 15 Min. zu prüfen.

Sporizidie nach EN 16615 (modifiziert)²:

Praxisnahe Prüfung von Flächen-desinfektionsmitteln im 4-Felder-Test

Wirksam bei jeder Belastung:

ULTRASOL ACTIVE erfüllt beide Normen und ist sporizid wirksam gegen *C. difficile* und *C. difficile* Ribotyp Ro27 bei 1 %iger Konzentration in 15 Min.¹ – sowohl unter niedrigen als auch unter hohen Belastungen.

Bestens informiert



Hier finden Sie detaillierte **Produktinformationen**, **Sicherheitsdatenblatt** und **Betriebsanweisung** zu ULTRASOL ACTIVE als PDF zum Download:

www.schumacher-online.com/de/desinfektion-hygiene/produkt/ultrasol-active/

¹Weitere Angaben zur Wirksamkeit finden Sie auf der Rückseite.

²modifiziert in Anlehnung an New Work Item Proposal (NWIP) – sporizide Wirkung auf nicht-porösen Oberflächen, 4-Felder-Test.



Über 40 Jahre Erfahrung für die Gesundheit des Menschen

Die Dr. Schumacher Gruppe ist mit mehr als 1.650 Mitarbeitern in acht Ländern einer der europaweit führenden Entwickler und Hersteller von Qualitätsprodukten aus den Bereichen Desinfektion, Hygiene, Reinigung, Pflege und Kosmetik. Die Produkte kommen im medizinischen Bereich zur Anwendung sowie bei Endverbrauchenden.

Europaweit führender Entwickler und Hersteller

Das Familienunternehmen mit Sitz im nordhessischen Malsfeld produziert sowohl unter eigener Marke als auch im Auftrag namhafter Unternehmen, Handelsketten und Markenartikler. Mit einem Netzwerk in rund 70 Ländern ist Dr. Schumacher mit seinen Produkten weltweit aktiv.

Wirkpektrum und Einwirkzeiten (Auszug)³

Anwendungsempfehlung zur tuberkuloziden Flächendesinfektion	2 % – 15 min 1 % – 60 min
Anwendungsempfehlung zur sporiziden Flächendesinfektion gegen C. diff. Ro27 im humanmedizinischen Bereich	1,5 % – 5 min 1 % – 15 min
Anwendungsempfehlung zur sporiziden (B. subtilis, B. cereus) Flächendesinfektion	2 % – 15 min 1 % – 30 min

Wirkpektrum und Einwirkzeiten (Hygienelevel)³

	PREVENT	PRESERVE	PROTECT
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion	1 % – 5 min 0,5 % – 15 min	1 % – 15 min	2 % – 15 min 1 % – 60 min

Zusammensetzung – 100 mg Lösung enthalten

Peressigsäure (in-situ) > 750 ppm (1 %ige Lösung)

Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.
Sachet	100	40 g	00-255-0004
Dose	6	1 kg	00-255-010

³Alle Angaben zum Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten finden Sie in der Produktinformation.

Prevent – begrenzt viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Preserve** – begrenzt viruzid plus sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Protect** – viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.