

DESINFEKTION UND HYGIENE FÜR PFLEGE- UND ALTENHEIME

Kernprogramm

Pflege



IMPRESSUM

Herausgeber

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld
Germany
T +49 5664 9496-0
F +49 5664 8444
info@schumacher-online.com
www.schumacher-online.com

LISTUNGEN

DAAB

HACCP

IHO

ÖGHMP

RKI A

RKI AB

RKI/DVV

VAH

DAAB – Produkt getestet und empfohlen vom Deutschen Allergie- und Asthmabund e. V. (www.daab.de). **HACCP** – Produkt ist für die Anwendung im Rahmen eines HACCP-Konzepts (nach Artikel 5 der VO (EG) 853/2004) geeignet. **IHO** – Produkt gelistet in der Desinfektionsmittelliste des Industrieverbands Hygiene und Oberflächenschutz für industrielle und institutionelle Anwendung e. V. (www.desinfektionsmittelliste.de). **ÖGHMP** – Produkt gelistet in der Desinfektionsmittelliste der Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (www.oeghmp.at). **RKI A** – Produkt gelistet in der Desinfektionsmittelliste des Robert-Koch-Instituts gemäß § 18 IfSG, Wirkungsbereich A. **RKI AB** – Produkt gelistet in der Desinfektionsmittelliste des Robert-Koch-Instituts gemäß § 18 IfSG, Wirkungsbereich AB. **RKI/DVV** – Viruzid wirksames Produkt nach der Leitlinie der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten e. V. (DVV) und des Robert-Koch-Instituts (RKI). **VAH** – Produkt gelistet in der Desinfektionsmittelliste des Verbunds für Angewandte Hygiene e. V. (www.vah-online.de).



Für die richtige Hygiene in der Pflege



In Pflegeheimen begegnen sich täglich viele Menschen – sie sitzen zusammen oder werden von Pflegerinnen und Pflegeern versorgt. Dabei kommt es häufig zu engem Hautkontakt. Bewohnerinnen und Bewohner sind besonders gefährdet, da ihr Körper durch Alter oder Vorerkrankungen zusätzlich geschwächt sein kann. Deshalb ist eine wirksame und umfassende Hygiene unerlässlich. Ob Reinigung, Pflege oder Desinfektion von Händen, Haut und Flächen: Es gibt vieles zu beachten. Mit den passenden Produktlösungen ist der erste Schritt getan.

Wir von Dr. Schumacher stellen Ihnen in unserem Kernprogramm Pflege ein umfassendes Portfolio zusammen, mit dem Sie die täglichen Routineaufgaben in Pflege- und Altenheimen sicher meistern. Auch für den Ausbruchsfall bieten wir passende Produktlösungen, sodass Sie behördliche Vorgaben korrekt umsetzen.

Hygiene im Pflegeheim

Routine und Ausbruchsfall

Routine

Bei der alltäglichen Pflege und Betreuung ist eine wirksame Hygiene unverzichtbar. Nur so können Sie verhindern, dass Erreger sich weiterverbreiten. Für die effektive Infektionsprävention sollten sich Händehygiene, Flächendesinfektion und die persönliche Schutzausrüstung immer ergänzen. Bei der Auswahl von Produkten wird zwischen der Routinedesinfektion und der Desinfektion im Infektionsfall unterschieden. Richten Sie Ihr Desinfektionsmittel konsequent an den jeweiligen Erregern aus und wählen Sie die passende Wirksamkeit.



Desinfizieren Sie sich Ihre Hände

- vor und nach direktem Kontakt mit der zu betreuenden Person und deren Umgebung
- vor aseptischen Tätigkeiten
- nach Kontakt mit potenziell infektiösen Materialien
- immer nach dem Ablegen von Einmalhandschuhen



Bei der Flächendesinfektion gilt:

- Desinfizieren Sie Oberflächen, auf denen aseptische Tätigkeiten durchgeführt werden
- Achten Sie besonders auf häufig berührte Oberflächen wie Türgriffe, Handläufe oder Schalter sowie auf personennahe Flächen wie Bettgestelle oder Nachttische
- Achten Sie darauf, dass die Produkte materialverträglich sind



Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA):

- medizinische Schutzhandschuhe zum einmaligen Gebrauch bei möglichem Kontakt mit Blut, Sekreten, Ausscheidungen oder potenziell infektiösem Material
- Schutzkittel, wenn mit einer Kontamination von Armen und Kleidung durch Krankheitserreger zu rechnen ist
- Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Masken, um sich vor Aerosolen zu schützen

Desinfektion in Infektionsfällen

Infizieren sich in einem Pflegeheim mehrere Personen mit dem gleichen Erreger, sprechen wir von einem Ausbruchsfall. Besteht der Verdacht oder sogar der Nachweis von übertragbaren Erkrankungen durch spezielle Erreger, z. B. durch Noro- oder Grippeviren, sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Im Fall eines Ausbruchs gilt u. a.:

- RKI-Ratgeber zu den Erregern sowie die KRINKO-Empfehlungen befolgen
- Infizierte Personen räumlich isolieren
- Frequenz von Desinfektionsmaßnahmen prüfen und bei Bedarf intensivieren
- Personal, zu betreuende Personen sowie Angehörige informieren und Besuchsregeln anpassen
- Gesundheitsamt informieren

Legen Sie weitere Schritte in Ihrem Hygienemanagement fest und schulen Sie das Personal zu den Erregern und den erweiterten Schutzmaßnahmen.

Eine **behördlich angeordnete Desinfektion gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz (IfSG)** stellt eine absolute Ausnahme dar. Tritt der Fall aufgrund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten trotzdem ein, halten Sie sich an die Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Instituts.

PREVENT

Umfasst das Wirkungsspektrum für die Routinedesinfektion.

WIRKUNGSSPEKTRUM

- bakterizid, levurozid, **begrenzt viruzid**¹

RELEVANTE VIREN

HBV, HCV, HIV, Corona- sowie Influenzaviren

PRESERVE

Umfasst das gesamte Wirkungsspektrum des **PREVENT** Levels und zusätzlich das folgende Wirkungsspektrum des **PRESERVE** Levels:

WIRKUNGSSPEKTRUM

- bakterizid, levurozid, **begrenzt viruzid PLUS**²

RELEVANTE VIREN

behüllte Viren, Noro-, Rota- und Adenoviren

PROTECT

Umfasst das gesamte Wirkungsspektrum des **PREVENT** Levels, des **PRESERVE** Levels und zusätzlich das folgende Wirkungsspektrum des **PROTECT** Levels:

WIRKUNGSSPEKTRUM

- bakterizid, levurozid, **viruzid**³

RELEVANTE VIREN

ECHO-Viren, Coxsackieviren, Rhinoviren, Picornaviren, Papillomviren

¹ Wirksamkeit gegen behüllte Viren
² Wirksamkeit gegen behüllte Viren sowie gegen Noro-, Adeno- und Rotaviren
³ Wirksamkeit gegen behüllte und unbehüllte Viren

Erfolgreiche Händehygiene einfach umgesetzt

Ob bei der täglichen Arbeit oder im Ausbruchsfall, eine wirksame Händehygiene ist entscheidend für den Schutz von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie des Personals. Denn die meisten Infektionen werden weiterhin mit unseren Händen weitergegeben. Für den Arbeitsalltag in einem Pflegeheim sollte ein Desinfektionsmittel mit passendem Wirkungsspektrum gewählt werden. Wir empfehlen ASEPTOMAN MED, das begrenzt viruzid PLUS wirkt. Verreiben Sie das Desinfektionsmittel über 30 Sekunden in Ihren Händen. Nur wenn die Hände während dieser Zeit mit Flüssigkeit benetzt sind, ist die Wirksamkeit gewährleistet. Pflegedienstleitungen können ihr Personal mit Spendern und hautverträglichen Händedesinfektionsmitteln zusätzlich unterstützen.



Wir haben für Sie weitere Tipps gesammelt, die in jeder Situation berücksichtigt werden können.



Arbeitsvorbereitung

Stellen Sie erforderliche Arbeitsmaterialien auf einem Tablett bereit, bevor Sie mit der Behandlung beginnen. So vermeiden Sie Unterbrechungen und reduzieren das Kontaminationsrisiko.



Spender

Desinfektionsmittelspender sind so anzubringen, dass sie ständig sichtbar und erreichbar sind. Wo kein Spender angebracht werden kann, sollte eine Desinfektionssäule stehen.



Richtige Dauer

Desinfizieren Sie sich Ihre Hände immer 30 Sekunden lang. Dabei müssen die Hände durchgehend mit Flüssigkeit benetzt sein. Anders ist eine volle Wirksamkeit nicht gewährleistet.



Kittelflaschen

Verwenden Sie Kittelflaschen für die wirksame Desinfektion unterwegs oder zwischen zwei Wohnerräumen. Sie passen in jede herkömmliche Dienstkleidung.



Standardarbeitsanweisungen

Definieren Sie Zeitpunkte für die Händedesinfektion, die während der Pflege erforderlich sind. Hilfreich sind etwa die fünf Momente der Händehygiene der WHO.



Pflegende Rückfetter

Unterstützen Sie Ihre Hände und schützen Sie sie vor trockener Haut. Greifen Sie daher zu Desinfektionsmitteln, die pflegende Rückfetter enthalten.

Die passende Hygiene für jeden Bereich im Pflegeheim



Bewohnerbereich

Bewohnerzimmer, Wohnbereichsküche,
Gemeinschaftsraum und Speisesaal,
Gymnastikraum, Flure, Pflegewagen

Seite **8–19**



Verwaltung und öffentliche Bereiche

Eingangsbereich, Verwaltung,
Sanitäreinrichtungen

Seite **20–25**



Funktionsbereiche

Dienstzimmer, Umkleieräume,
Abschiedsraum, Pflegebad, Reinigungswagen,
Pflegearbeitsraum, Müllraum,
Hauswirtschaftsraum, Wäscherei

Seite **26–43**

Die passende Hygiene für jeden Bereich im Pflegeheim



Küche

Anlieferung und Lager, Produktionsküche


Seite **44–47**



Haustechnik

Haustechnik

Seite **48–49**

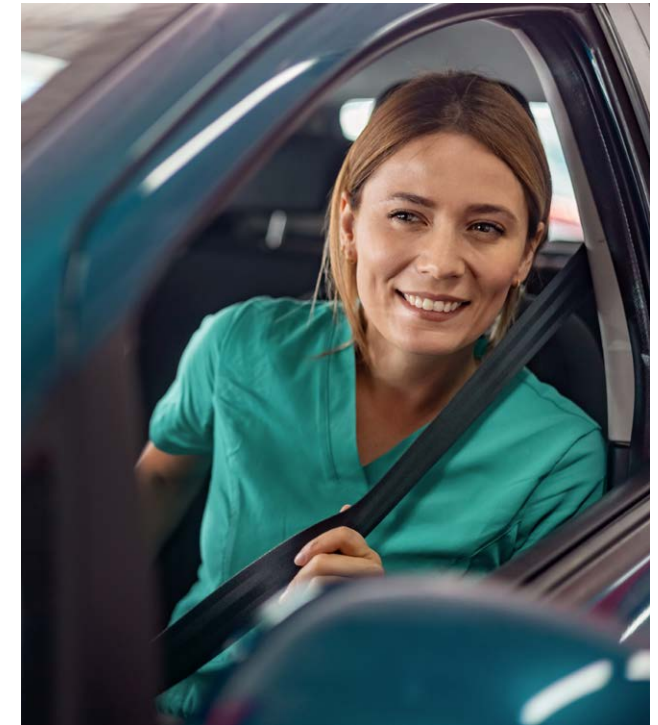

Ambulante Dienste / Fahrdienste

Fahrzeug und mobiler Einsatz

Seite **50–51**

Die Dr. Schumacher Produkte im Bewohnerzimmer

Für die Routine

- 1 Fußboden**
Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)
- 2 Oberflächen (Tische, Regalflächen, Türgriffe usw.)**
Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)
- 3 Bewohnernahe Oberflächen (Nachtschrank, Bettgestell usw.)**
Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)
- 4 Handwaschplatz**
Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)
ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)
Reinigung: DESCOLIND PURE WASH (S. 58)
Hautschutz: DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM (S. 58)
- 5 Toilette**
Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)
- 6 Bewohnerin und Bewohner**
Hauptpflege: DESCOMED BARRIERECREME (S. 59)
DESCO VITAL GEL (S. 60)
Hautreinigung: DESCOLIND CARE WIPES (S. 60)
DESODERM CARE WIPES (S. 61)

Für den Ausbruchsfall

- 1 Fußboden**
Fläche: ULTRASOL® ACTIVE (S. 69)
ULTRASOL OXY® (S. 70)
- 2 Oberflächen (Tische, Regalflächen, Türgriffe usw.)**
Fläche: ULTRASOL OXY®/WIPES/XL (S. 70)
- 3 Bewohnernahe Oberflächen (Nachtschrank, Bettgestell usw.)**
Fläche: ULTRASOL OXY®/WIPES/XL (S. 70)
- 4 Handwaschplatz**
Desinfektion: ASEPTOMAN® FORTE (S. 68)
- 5 Toilette**
Fläche: ULTRASOL OXY®/WIPES/XL (S. 70)



Die Dr. Schumacher Produkte in der Wohnbereichsküche

Für die Routine

1 Fußboden

Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)

2 Oberflächen (Arbeitsflächen, Tische, Regalflächen usw.)

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

3 Handwaschplatz

Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)

ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)

Reinigung: DESCOLIND PURE WASH (S. 58)

4 Kühlschrank

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)





Die Dr. Schumacher Produkte im Gemeinschaftsraum und Speisesaal

Für die Routine

1 Fußboden

Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)

2 Oberflächen (Tische, Regalflächen, Türgriffe usw.)

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

3 Wandspender

Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)
ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)

4 Rollatoren, Rollstühle, Gehhilfen

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)



Die Dr. Schumacher Produkte im **Gymnastikraum**

Für die Routine

1 Fußboden

Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)

2 Oberflächen (Türgriffe, Regalflächen usw.)

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

3 Wandspender

Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)
ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)

4 Handläufe


Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

5 Therapiegeräte (Gurte, Griffe, Geräte-/Bedienoberflächen usw.)

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

6 Massageplatz

Hautpflege: DESCO VITAL GEL (S. 60)

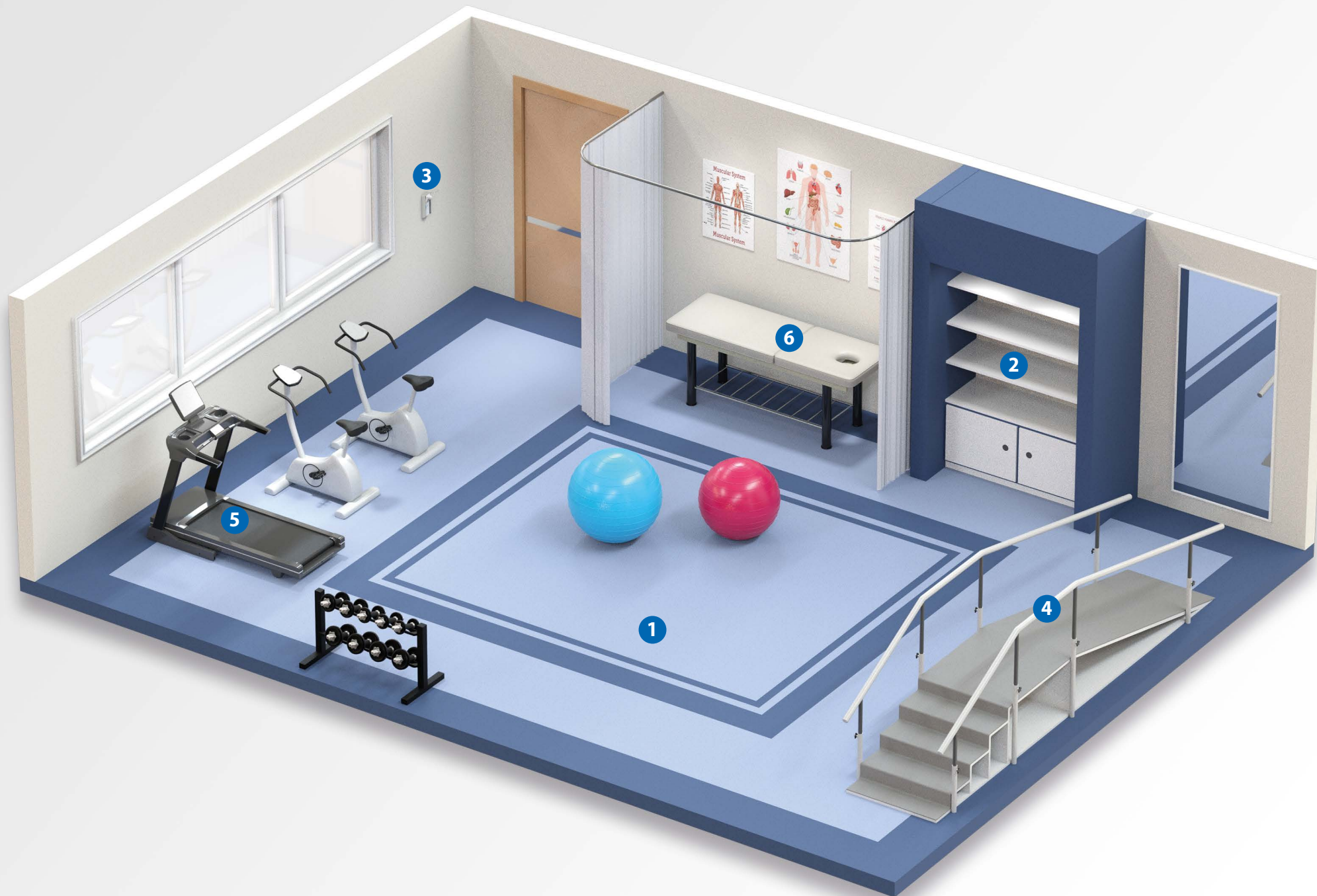

Die Dr. Schumacher Produkte in den Fluren

Für die Routine

- 1 **Fußboden**
Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)
- 2 **Türgriffe**
Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)
- 3 **Handläufe**
Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

Für den Ausbruchsfall

- 1 **Fußboden**
Fläche: ULTRASOL® ACTIVE (S. 69)
ULTRASOL OXY® (S. 70)
- 2 **Türgriffe**
Fläche: ULTRASOL OXY®/WIPES/XL (S. 70)
- 3 **Handläufe**
Fläche: ULTRASOL OXY®/WIPES/XL (S. 70)



1

2

3

Die Dr. Schumacher Produkte für den Pflegewagen

Für die Routine

1 Oberflächen

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)
OPTISAL® PLUS (S. 64)

2 Händedesinfektion

ASEPTOMAN® MED (S. 54)
ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)

3 Ausstattung

Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)
ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)

Hautpflege: DESCOMED BARRIERECREME (S. 57)
DESCO VITAL GEL (S. 60)

Hautreinigung: DECONTAMAN PRE WASH (S. 56)
DECONTAMAN PRE WIPES (S. 56)
DECONTAMAN PRE CAP (S. 57)
DESCOLIND CARE WIPES (S. 60)
DESODERM CARE WIPES (S. 61)

Für den Ausbruchsfall

1 Oberflächen

Fläche: ULTRASOL OXY®/WIPES/XL (S. 70)

2 Händedesinfektion

ASEPTOMAN® FORTE (S. 68)

3 Ausstattung

Desinfektion: ASEPTOMAN® FORTE (S. 68)



Die Dr. Schumacher Produkte im Eingangsbereich

Für die Routine

1 Fußboden

Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)

2 Oberflächen (Tische, Türgriffe usw.)

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

3 Spendersäulen

Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)
ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)

4 Aufzugtüren, Tasten

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

5 Handläufe

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)



Die Dr. Schumacher Produkte in der **Verwaltung**

Für die Routine

1 Fußboden

Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)

2 Oberflächen (Tische, Türgriff, Mülleimer, Regalflächen usw.)

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

3 Spendersäule

Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)
ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)

4 Tastaturen

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

5 Telefone

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)



Die Dr. Schumacher Produkte in den Sanitäreinrichtungen

Für die Routine

1 Fußboden

Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)

2 Oberflächen (Handgriffe, Armaturen, Mülleimer usw.)

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

3 Handwaschplatz

Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)

ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)

Reinigung: DESCOLIND PURE WASH (S. 58)

4 Urinale

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

5 Toilette

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

6 Türgriffe

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)



Die Dr. Schumacher Produkte im Dienstzimmer

Für die Routine

1 Fußboden

Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)

2 Oberflächen (Tische, Medikamentenstellplatz, Arbeitsoberflächen, Regalflächen usw.)

Fläche: ONE SYSTEM PLUS (S. 60)

DESCOCEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

3 Handwaschplatz

Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)

ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)

Reinigung: DESCOLIND PURE WASH (S. 58)

Hautschutz: DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM (S. 58)

4 Medikamentenkühlschrank

Fläche: DESCOCEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

5 Medikamentenschrank

Fläche: DESCOCEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

6 Aufbereitung Mehrweg-Vliestuchspendersystem

Vliestuchspendersystem: ECO WIPES (S. 61)

Fläche: ULTRASOL OXY®/WIPES/XL (S. 70)



Die Dr. Schumacher Produkte in den Umkleideräumen

Für die Routine

1 Fußboden

Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)

2 Oberflächen (Türgriffe, Handgriffe, Armaturen, Schränke, Bänke usw.)

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

3 Handwaschplatz

Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)

ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)

Reinigung: DESCOLIND PURE WASH (S. 58)

Hautschutz und -pflege: DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM (S. 58)

4 Körperreinigung:

DESCOLIND PURE WASH (S. 58)



Die Dr. Schumacher Produkte im **Abschiedsraum**

Für die Routine

1 Fußboden

Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)

2 Oberflächen

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

3 Spendersäule

Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)
ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)



Die Dr. Schumacher Produkte im Pflegebad

Für die Routine

1 Fußboden

Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)

2 Oberflächen (Türgriffe, Handgriffe, Armaturen, Mülleimer usw.)

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

3 Handwaschplatz

Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)

ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)

Reinigung: DESCOLIND PURE WASH (S. 58)

4 Toilette

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

5 Geräte-/Bedienoberflächen

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

6 Bewohnerin und Bewohner

Hautpflege: DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM (S. 58)

DESCOMED BARRIERECREME (S. 57)

DESCO VITAL GEL (S. 60)

Hautreinigung: DESCOMED ÖLBAD (S. 59)

DESCOLIND CARE WIPES (S. 60)

DESODERM CARE WIPES (S. 61)

Für den Ausbruchsfall

1 Fußboden

Fläche: ULTRASOL® ACTIVE (S. 69)

ULTRASOL OXY® (S. 70)

2 Oberflächen (Türgriffe, Handgriffe, Armaturen, Mülleimer usw.)

Fläche: ULTRASOL OXY®/WIPES/XL (S. 70)

3 Handwaschplatz

Desinfektion: ASEPTOMAN® FORTE (S. 68)

4 Toilette

Fläche: ULTRASOL OXY®/WIPES/XL (S. 70)

6 Pflegebadewanne

Fläche: ULTRASOL OXY® WIPES/XL (S. 70)



Die Dr. Schumacher Produkte für den **Reinigungswagen**

Für die Routine

1 Oberflächen

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

2 Zum Reinigen von Fußböden

Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)

3 Händedesinfektion

ASEPTOMAN® MED (S. 54)

ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)



Die Dr. Schumacher Produkte im Pflegearbeitsraum

Für die Routine

1 Fußboden

Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)

2 Oberflächen (Tische, Türgriffe, Arbeitsfläche usw.)

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

3 Handwaschplatz

Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)

ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)

Reinigung: DESCOLIND PURE WASH (S. 58)

4 Steckbeckenautomat Geräte-/Bedienoberflächen, Griffe usw.)

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

5 Steckbeckenautomat im Betrieb

Instrumente: THERMO CLEAR (S. 64)

THERMO ALKA CLEAR (S. 65)

6 Aufbereitung Instrumente

Instrumente: PLURAZYME® EXTRA (S. 66)

PERFEKTAN® ACTIVE (S. 66)



Die Dr. Schumacher Produkte im Müllraum

Für die Routine

1 Fußboden

Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)

2 Oberflächen (Türgriffe, Arbeitsflächen, Tische, Schränke usw.)

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

3 Handwaschplatz

Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)

ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)

Reinigung: DESCOLIND PURE WASH (S. 58)

4 Aufbewahrungscontainer

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)



Die Dr. Schumacher Produkte im Hauswirtschaftsraum

Für die Routine

1 Fußboden

Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)

2 Oberflächen (Türgriffe, Armaturen, Mülleimer usw.)

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

3 Handwaschplatz

Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)

ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)

Reinigung: DESCOLIND PURE WASH (S. 58)

4 Geräte-/Bedienoberflächen

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)



Die Dr. Schumacher Produkte in der Wäscherei

Für die Routine

- 1 Fußboden**
Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)
- 2 Oberflächen (Türgriffe, Armaturen, Mülleimer usw.)**
Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)
- 3 Handwaschplatz**
Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)
ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)
Reinigung: DESCOLIND PURE WASH (S. 58)
- 4 Geräte-/Bedienoberflächen**
Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)
- 5 Waschmaschine (Bedienfelder, Tür, Trommeldichtung, Einspülkasten usw.)**
Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)
- ! Besondere Anweisungen beachten**

Für den Ausbruchsfall

- 1 Fußboden**
Fläche: ULTRASOL® ACTIVE (S. 69)
ULTRASOL OXY® (S. 70)
- 2 Oberflächen (Türgriffe, Armaturen, Mülleimer usw.)**
Fläche: ULTRASOL OXY®/WIPES/XL (S. 70)
- 3 Handwaschplatz**
Desinfektion: ASEPTOMAN® FORTE (S. 68)



Die Dr. Schumacher Produkte in der **Anlieferung und im Lager**

Für die Routine

1 Fußboden

Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)

2 Oberflächen (Wagen, Regalflächen, Türgriff usw.)

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

3 Wandspender

Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)
ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)





Die Dr. Schumacher Produkte in der Produktionsküche


Für die Routine

- 1 Fußboden**
Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)
- 2 Oberflächen (Türgriffe, Arbeitsfläche, Armaturen, Regalflächen usw.)**
Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)
- 3 Handwaschplatz**
Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)
ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)
Reinigung: DESCOLIND PURE WASH (S. 58)
- 4 Geräte-/Bedienoberflächen**
Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)
- 5 Schneidebretter**
Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

Für den Ausbruchsfall

- 1 Fußboden**
Fläche: ULTRASOL® ACTIVE (S. 69)
ULTRASOL OXY® (S. 70)
- 2 Oberflächen (Türgriffe, Arbeitsfläche, Armaturen, Regalflächen usw.)**
Fläche: ULTRASOL OXY®/WIPES/XL (S. 70)
- 3 Handwaschplatz**
Desinfektion: ASEPTOMAN® FORTE (S. 68)



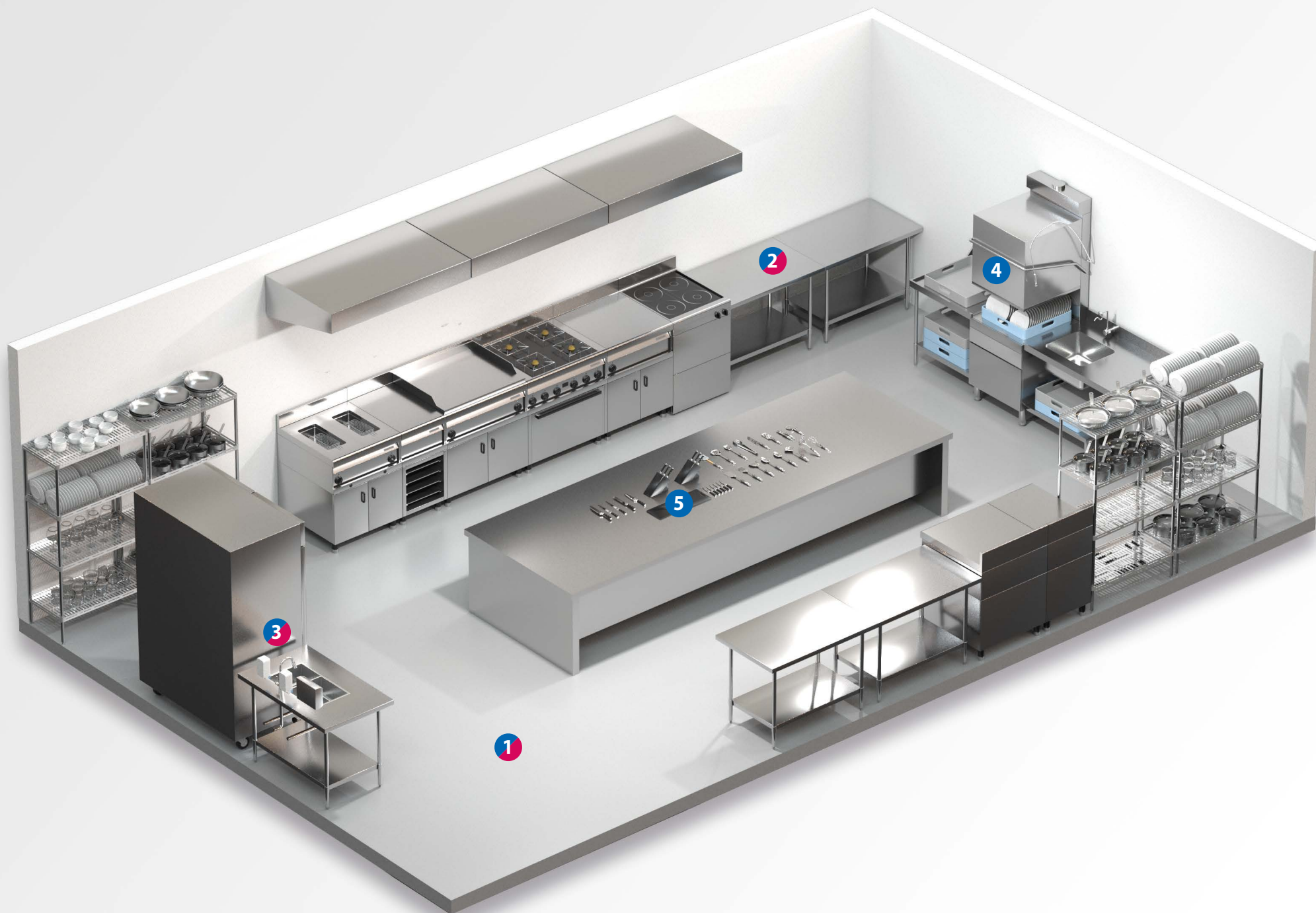

Die Dr. Schumacher Produkte in der Haustechnik

Für die Routine

1 Fußboden

Fläche: OPTISAL® PLUS (S. 64)

2 Bedienoberflächen

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

3 Handwaschplatz

Desinfektion: ASEPTOMAN® MED (S. 54)

ASEPTOMAN® PLUS (S. 55)

Reinigung: DESCOLIND PURE WASH (S. 58)



Die Dr. Schumacher Produkte im Fahrzeug und mobilen Einsatz

Für die Routine

1 Lenkrad

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

2 Oberflächen (Bedienflächen, Schalthebel usw.)

Fläche: DESCOSEPT SENSITIVE/WIPES/XL (S. 63)

3 Händedesinfektion

ASEPTOMAN® GEL (S. 55)

4 Für den mobilen Einsatz

Hautpflege: DESCOMED BARRIERECREME (S. 57)

DESCO VITAL GEL (S. 60)

Hautreinigung: DESCOLIND CARE WIPES (S. 60)

DESODERM CARE WIPES (S. 61)



A healthcare professional, likely a nurse, wearing blue scrubs and glasses, is leaning over to assist an elderly patient. The patient is sitting on a bed, wearing a light blue patterned hospital gown. The nurse is holding the patient's arm, possibly helping her sit up or move. A wheelchair is visible in the foreground on the right. The background shows a hospital room with a window and a bedside table.

ROUTINE

Unsere Produktlösung **für Ihre tägliche Arbeit**



Mit unserem hier vorgestellten Produktportfolio decken Sie alle Arbeitsbereiche ab: von der Hände- und Hauthygiene, über die Flächenreinigung und -desinfektion bis zur Aufbereitung von medizinischen Instrumenten. Die Produktlösungen haben wir so ausgewählt, dass Sie für jede Routineanwendung eine ausreichend wirksame Pflege, Reinigung oder Desinfektion erzielen. So finden Sie schnell und unkompliziert die passende Lösung für Ihre Herausforderungen.



VAH

IHO

HACCP

**PRESERVE**

ASEPTOMAN® MED

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel

- Begrenzt viruzid PLUS innerhalb von 30 Sekunden
- Dank niedrigem Alkoholgehalt insbesondere für die häufige Anwendung geeignet
- Wirksam gegen Noro-, Rota- und Adenoviren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- Breites Wirkspektrum für die Routine und den Ausbruchsfall
- Frei von Parfüm und Farbstoffen sowie QAV

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut. ASEPTOMAN MED ist dank niedrigem Alkoholgehalt und breitem Wirkspektrum sehr gut geeignet für die tägliche Routine. ASEPTOMAN MED wirkt gegen Noro- und Adenoviren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion. ASEPTOMAN MED erfüllt die Anforderungen an Händedesinfektionsmittel zur Verwendung bei Ausbrüchen von Noro-, Rota- und Adenoviren. Es ist parfümfrei und frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, die sich auf der Haut anreichern und so zu Hautreizungen führen können. Darüber hinaus enthält ASEPTOMAN MED hochwertige rückfettende und pflegende Inhaltsstoffe, die einer Austrocknung der Haut vorbeugen.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

PREVENT **PRESERVE** **PROTECT**

Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion

30 s

30 s

Zusammensetzung ~ 100 g Lösung enthalten

65 g Ethanol

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Kittelflasche	25	50 ml		00-457OP-0005-01
Kittelflasche	20	100 ml	20228515	00-457OP-001
Kittelflasche	20	150 ml	16821124	00-457OP-0015
Pumpflasche	12	500 ml	20308846	00-457OP-P005
Spenderflasche	20	500 ml	13420821	00-457OP-005
ESH Vacu-Bag	8	700 ml	19764510	00-457OP-B007
ESH Vacu-Bag lang	8	700 ml	19980099	00-457OP-B007L
Spenderflasche	12	1 L	13420809	00-457OP-010
Kanister	3	5 L	14307340	00-457OP-050



**Ausgezeichnet
und QAV-frei!**

VAH – VAH-gelistet zur hygienischen Händedesinfektion mit 30 Sekunden Einwirkzeit. **Prevent** – begrenzt viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Preserve** – begrenzt viruzid PLUS sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Protect** – viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



NEU

IHO

HACCP



Ethanolfrei

PRESERVE

ASEPTOMAN® PLUS

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel

- Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- Begrenzt viruzid PLUS für umfangreichen Schutz in der Routine
- Frei von Parfüm und Farbstoffen sowie QAV für eine gute Hautverträglichkeit

ASEPTOMAN PLUS ist ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel. Es ist umfassend wirksam inkl. begrenzt viruzid plus, enthält hautpflegende und rückfettende Inhaltsstoffe und ist daher das Produkt für die tägliche Routine. ASEPTOMAN PLUS ist innerhalb der hygienischen Händedesinfektion wirksam gegen Noro-, Rota- und Adenoviren und erfüllt die Anforderungen an Händedesinfektionsmittel zur Verwendung bei derartigen Ausbrüchen. Kurze Einwirkzeiten für die chirurgische Händedesinfektion ermöglichen eine hohe Effizienz im Rahmen der OP-Vorbereitung. ASEPTOMAN PLUS ist frei von QAV, Farbstoffen und Parfüm und erfüllt die hohen Anforderungen an den Einsatz im Lebensmittelbereich im Rahmen eines HACCP-Konzeptes.



VAH

IHO

ÖGHMP



PROTECT

ASEPTOMAN® GEL

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel

- Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, viruzid
- Praktisch in der Anwendung dank Gelform – auch für unterwegs wie z. B. im Rettungswagen oder im ambulanten Pflegedienst
- Hochwertige Inhaltsstoffe und Feuchthaltemittel für eine höhere Hygiene Compliance
- Frei von Parfüm- und Farbstoffen sowie QAV

Viruzides, alkoholisches Händedesinfektionsgel zur Anwendung auf der Haut. ASEPTOMAN GEL ist dermatologisch getestet und durch die Gelform besonders praktisch in der Anwendung. ASEPTOMAN GEL ist parfümfrei und frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, die sich auf der Haut anreichern und so zu Hautreizungen führen können. Darüber hinaus enthält ASEPTOMAN GEL hochwertige rückfettende Inhaltsstoffe sowie Feuchthaltemittel, die einer Austrocknung der Haut entgegenwirken. Das Produkt ist kompatibel mit allen Waschlotionen und enthält keine quaternären Ammoniumverbindungen.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten (siehe ergänzend Tabelle S. 70)

	PREVENT	PRESERVE	PROTECT
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion	30 s	30 s	
Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion	1,5 min	1,5 min	

Zusammensetzung – 100 g Lösung enthalten

50 g 1-Propanol, 20 g Isopropanol

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Kittelflasche	20	150 ml	20087799	00-407OP-0015-30
Spenderflasche	20	500 ml	20087782	00-407OP-005-30
Spenderflasche	12	1 L	20087813	00-407OP-010-30

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

	PREVENT	PRESERVE	PROTECT
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion	15 s	60 s	1,5 min

Zusammensetzung – 100 g Lösung enthalten

84,3 g Ethanol

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Kittelflasche	20	100 ml	14374916	00-409-001
Kittelflasche	20	150 ml	19228935	00-409-0015-02
Spenderflasche	20	500 ml	10109086	00-409-005-01
Spenderflasche	12	1 L	10109092	00-409-010-01

VAH – VAH-gelistet zur hygienischen Händedesinfektion mit 30 Sekunden Einwirkzeit. **Prevent** – begrenzt viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Preserve** – begrenzt viruzid PLUS sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Protect** – viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



VAH

IHO

**PREVENT**

DECONTAMAN PRE WASH

Antimikrobielle Waschlotion für Hände und Haut

- Zur präoperativen, antimikrobiellen Patientenwaschung und Dekontamination von Haut, Händen und Haaren
- Zur antimikrobiellen Händewaschung, auch bei hoher Belastung mit Fett oder Eiweiß
- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid
- Kurze Einwirkzeit: 30 Sekunden
- Frei von Farb- und Duftstoffen sowie Phenolen

DECONTAMAN PRE WASH ist geeignet für die antimikrobielle Körperwaschung bei MRSA-Kolonisation sowie bei anderen multi-resistenten Erregern wie VRE, ESBL und anderen MRGN, insbesondere auch zur Anwendung vor stationärem Aufenthalt. Dank milder Tenside und Rückfetter ist sie für die regelmäßige Anwendung und zur hygienischen Händewaschung nach VAH geeignet.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händewaschung ¹	EN 1499/VAH		30 s
Begrenzt viruzid	EN 14476	hohe Belastung	30 s

Ergänzende Prüfergebnisse nach EN

Bakterizid	EN 13727	hohe Belastung	15 s
Levurozid (C. albicans)	EN 13624	hohe Belastung	30 s

Zusammensetzung – 100 g Lösung enthalten

4 g Chlorhexidindigluconat
1,5 g Phenoxyethanol

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Spenderflasche	20	500 ml	15433584	00-531-005
Spenderflasche	12	1 L	15433561	00-531-010
Kanister	3	5 L	15433578	00-531-050

¹ einschließlich Phase 2 Stufe 1 und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

Prevent – begrenzt viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. Preserve – begrenzt viruzid PLUS sowie bakterizid, levurozid wirksam. Protect – viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



DECONTAMAN PRE WIPES

Antimikrobielle Reinigungstücher

- Zur präoperativen, antimikrobiellen Patientenwaschung und Dekontamination ohne Wasser
- Ermöglichen eine zeitsparende, gründliche Reinigung und Dekontamination
- Umfassend wirksam gegenüber Bakterien, einschließlich multiresistenten Erregern
- Tücher können für einen höheren Patientenkomfort erwärmt werden
- Frei von Phenolen, Alkoholen sowie Farbstoffen

DECONTAMAN PRE WIPES sind gebrauchsfertige Waschtücher zur antimikrobiellen Reinigung der Haut. Die großen Waschtücher bestehen aus strapazierfähigem, angenehm weichen Vliesstoff und sind mit einer milden Desinfektionslösung mit 2 % Chlorhexidin getränkt. Dank des auf der Haut verbleibenden Wirkstofffilms kann ein 24-stündiger Remanenzeffekt gegenüber Bakterien erreicht werden.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

Anwendungsempfehlung zur desinfizierenden Patientenwaschung ¹	EN 1499 (modifiziert)	hohe Belastung	5 min
Bakterizid	EN 13727	niedrige Belastung	1 min
Bakterizid	EN 13727	hohe Belastung	5 min
Levurozid (C. albicans)	EN 13624	niedrige und hohe Belastung	3 min

Zusammensetzung – 100 g Lösung enthalten

2 g Chlorhexidindigluconat

Gebinde	VE	Inhalt	Größe	PZN	Art. Nr.
Packung	24	10 Tücher	20 x 30 cm	15433609	00-530-To10



DECONTAMAN PRE CAP

Antimikrobielle Waschhaube

- Zur antimikrobiellen Haarwäsche ohne Wasser - kein Nachspülen notwendig
- Praktisch und schnell in der Handhabung durch bedarfsbezogene Haubenapplikation
- Mikrowellengeeignet für einen höheren Patientenkomfort
- Breite Wirksamkeit gegenüber Bakterien inklusive multiresistenten Erregern
- Latexfreies, strapazierfähiges Material

DECONTAMAN PRE CAP ist eine gebrauchsfertige Waschhaube zur antimikrobiellen Reinigung der Haare und Kopfhaut. DECONTAMAN PRE CAP ermöglicht eine zeitsparende, gründliche Reinigung insbesondere bei immobilen Patienten, ohne ein erforderliches Nachspülen mit Wasser. Die antimikrobielle Wirksamkeit dient dem Einsatz innerhalb der Ganzkörperwaschung bei MRE-kontaminierten Patienten. Die verwendete Haube ist aus einem latexfreien, sehr strapazierfähigen Material und kann bei Bedarf vorerwärmt werden.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

Anwendungsempfehlung zur desinfizierenden Haarwäsche ¹	EN 1499 (modifiziert)	hohe Belastung	5 min
Bakterizid	EN 13727	niedrige Belastung	1 min
Bakterizid	EN 13727	hohe Belastung	5 min
Levurozid (C. albicans)	EN 13624	niedrige und hohe Belastung	3 min


Zusammensetzung – 100 g Lösung enthalten

2 g Chlorhexidindigluconat

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Packung	30	1 Haube	15433590	00-530-H001

¹ einschließlich Phase 2 Stufe 1 und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Reihenfolge bei der Ganzkörperwaschung

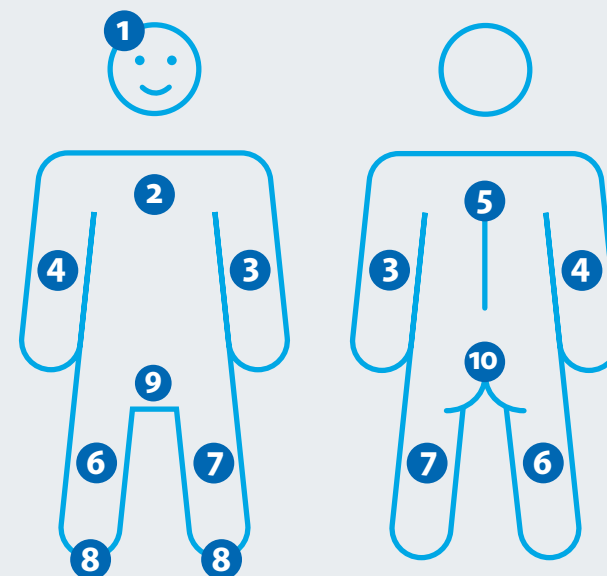

1 Gesicht

Die Augen bleiben während der Reinigung des Gesichts geschlossen. Achten Sie darauf, dass keine Reinigungslösung in die Augen und Ohren gerät.

2 Brust/Bauch

Vom Hals abwärts den Brustkorb, Bauch und Bauchnabel reinigen. Bei diesem Reinigungsschritt ist darauf zu achten, dass der Unterkörper warmgehalten wird.

3 Arme

Beginnend mit den Fingerspitzen, Hände und Arme bis zu den Schultern waschen. Achselhöhlen sind bei der Reinigung besonders zu berücksichtigen.

5 Rücken

Zu waschende Person aufsetzen oder zur Seite drehen. Vom äußeren Bereich nach innen Nacken und Rücken waschen. Oberkörper ankleiden und zu reinigende Person auf dem Rücken lagern.

6 Beine

Beine von der Hüfte abwärts waschen.

8 Füße

Zuerst die Zehen und Zehenzwischenräume reinigen und danach die restlichen Fußpartien waschen.

9 Intimbereich

Äußeren Intimbereich reinigen.

10 Gesäß

Gesäß und äußeren Analbereich der auf die Seite gedrehten Person waschen.

! Wichtig:

Bei der Reinigung sind Handtücher so zu platzieren, dass die frische Bettwäsche nicht mit der ungewaschenen Körperseite in Berührung kommt. Schleimhautkontakt ist zu vermeiden!



Sensible Haut

HACCP



DESCOLIND PURE WASH

Parfümfreie Waschlotion

- Zur Anwendung im Rahmen der Handwaschroutine
- Auch zur Patientenaschung und gelegentlichen Haarwäsche geeignet
- Mit Allantoin, Rückfetter und Glycerin gegen ein Austrocknen der Haut
- Mild reinigend und pH-hautneutral für ein angenehmes Hautgefühl
- Parfüm- und farbstofffrei und somit anwendbar im Lebensmittelbereich (HACCP)

DESCOLIND PURE WASH ist eine pH-hautneutrale Waschlotion für die regelmäßige Händewaschung und Körperreinigung, insbesondere für sensible Hauttypen. Die Formulierung mit rückfettenden Bestandteilen und Glycerin vermindert ein Austrocknen der Haut während des Waschens. Die cremig-zarte DESCOLIND PURE WASH Waschlotion reinigt gründlich und ist sparsam in der Anwendung. Darüber hinaus ist DESCOLIND PURE WASH frei von Parfüm und Farbstoffen und eignet sich daher für die Anwendung auf intakter und sensibler Haut.

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Pumpflasche	12	500 ml	20308852	00-631OP-P005
Spenderflasche	20	500 ml	16674930	00-631OP-005-01
ESH Vacu-Bag	8	700 ml	19764527	00-631OP-B007
ESH Vacu-Bag lang	8	700 ml	19980107	00-631OP-B007L
Spenderflasche	12	1 L	16674924	00-631OP-010-01
Kanister	3	5 L	16674947	00-631OP-050-01

¹ Allergierisiken minimiert. Allergierisiken können niemals vollständig ausgeschlossen werden.



Zu Allergien neigende Haut

HACCP



DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM

2 in 1 Hautschutz- und Pflegecreme

- Hypoallergene¹ Öl-in-Wasser-Emulsion für die zu Allergien neigende Haut
- Einzigartige Rezeptur mit Zweifachwirkung: Schützt die Haut vor wasserlöslichen Stoffen und versorgt sie mit einer Extraportion Pflege
- Schutzwirkung nach den Prüfmethode bestätigt (gem. TRGS 401/ABD)
- Mit Glycerin, Lipiden sowie natürlichem Deokomplex mit Hamamelis für ein angenehmes Hautgefühl
- Parfüm- und farbstofffrei

DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM wurde speziell zum Schutz empfindlicher und zu Allergien neigender Hände im Arbeitsalltag entwickelt. Die Öl-in-Wasser-Hautschutzcreme lässt sich hervorragend verteilen und zieht schnell in die Haut ein. DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM hinterlässt ein glattes sowie gepflegtes Gefühl und eignet sich zur täglichen Anwendung vor hautbelastenden Tätigkeiten, um die Haut der Hände bei Feuchtarbeiten zu schützen. Die Schutzwirkung von DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM gegenüber wasserlöslichen Stoffen (Tensiden und Laugen) wurde nach anerkannten Prüfmethode im Probandenversuch nachgewiesen. Durch den zusätzlichen Verzicht auf Parfüm entspricht DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM den Anforderungen der Berufsgenossenschaft, der TRGS 401 sowie der AWMF-Leitlinie Händehygiene. Sie ist auch zur Anwendung in Wandspendern geeignet. Neben ihrer Schutzwirkung verfügt DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM auch über pflegende Eigenschaften und beinhaltet hierfür rückfettende Lipide sowie Glycerin.

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Tube	12	100 ml	16674893	00-623-001-01
Spenderflasche	20	500 ml	16674901	00-623-005-01
ESH Vacu-Bag	8	700 ml	19764496	00-623-B007
ESH Vacu-Bag lang	8	700 ml	19980082	00-623-B007L



DESCOMED BARRIERECREME

Wasser-in-Öl-Creme

- Wasser-in-Öl Creme mit 37% Lipidgehalt
- Zur Pflege der Haut und zum Schutz vor Inkontinenz-assoziiierter Dermatitis
- Mit Allantoin, Glycerin, Zinkoxid sowie Bienenwachs und Sheabutter für ein angenehmes Hautgefühl
- Schützt die Haut vor negativen Einflüssen
- Parfüm- und farbstofffrei

DESCOMED Barrierecreme ist speziell zum Schutz und zur Pflege von stark beanspruchten und bereits angegriffenen Hautpartien entwickelt worden. Sie bildet auf der Haut einen Schutzfilm, der die Haut vor negativen Einflüssen schützt. DESCOMED Barrierecreme ist äußerst sparsam in der Anwendung.



DESCOMED ÖLBAD

Medizinisches Ölbad

- Hochwertiger Badezusatz mit wertvollen Pflegeölen zur intensiven Pflege trockener und schuppiger Haut
- Mit Aloe Vera, Jojobaöl, Rapsöl, Panthenol und Vitamin E für ein angenehmes Hautgefühl
- Dermatologisch getestet
- Besonders reichhaltig

DESCOMED ÖLBAD ist ein hochwertiger Badezusatz mit wertvollen Pflegeölen wie Raps- und Jojobaöl, die einen angenehmen pflegenden Film auf der Haut hinterlassen. DESCOMED ÖLBAD eignet sich daher als Badezusatz bei trockener, gereizter und schuppiger Haut wie z. B. bei älteren Patienten sowie bei trockenen Ekzemen.

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Tube	12	100 ml	16237187	00-627-001

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Flasche	9	250 ml	01899190	00-609-0025-01
Flasche	6	500 ml	07133230	00-609-005-01
Kanister	3	5 L	07133253	00-609-050-01



DESCO VITAL GEL

Vitalisierendes Gel zum Einreiben der Haut

- Angenehm kühlend, entspannend und belebend zum Einreiben der Haut
- Mit Pflanzenölen aus Fichtennadeln, Eukalyptus, Wacholder und Thymian
- Besonders entspannend und aktivierend nach körperlicher Betätigung
- Eignet sich für alle Bereiche, in denen ein angenehm entspannender und vitalisierender Effekt erwünscht ist

DESCO VITAL GEL ist ein Hydro-Gel mit ätherischen Ölen aus Fichtennadeln, Eukalyptus, Wacholderbeeren und Thymian zum Beleben der Haut. DESCO VITAL GEL wirkt angenehm kühlend, entspannend und aktivierend nach anstrengender körperlicher Betätigung. Besonders beim Sport und der Massage sowie in der Krankenpflege, aber auch in allen anderen Bereichen, in denen ein angenehm entspannender und vitalisierender Effekt erwünscht ist, ideal einsetzbar. DESCO VITAL GEL hat einen angenehmen, frischen Duft und ist gut hautverträglich.

100 % recyclebare
Verpackungsfolie



DESCOLIND CARE WIPES

Pflegende Reinigungstücher für die schonende Patientenwaschung

- Mit Panthenol und Allantoin
- Praktisch und schnell in der Handhabung
- Mikrowellengeeignet
- Geeignet zur Ganzkörperwaschung ohne Nachspülen mit Wasser
- Auch zur Stoma-Pflege sowie zur Reinigung des Stoma-Bereichs geeignet

DESCOLIND CARE WIPES sind gebrauchsfertige Tücher zur Reinigung und Pflege der Haut. Sie ermöglichen eine zeitsparende, gründliche Reinigung, insbesondere von immobilen Patienten. Die Tücher dienen dem Einsatz innerhalb der Ganzkörperwaschung und erfordern kein Nachspülen mit Wasser. Durch die Verwendung sehr milder, pflanzlich basierter Tenside und pflegender Wirkstoffe wie Allantoin und Panthenol besitzen DESCOLIND CARE WIPES nicht nur sanft reinigende, sondern auch pflegende Eigenschaften sowie einen angenehmen Geruch. Die großen Waschtücher bestehen aus strapazierfähigem, hautfreundlichem Vliesstoff und können bei Bedarf vorgewärmt werden.

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Tube	12	100 ml	04918255	00-605-001
Spenderflasche	20	500 ml	00190615	00-605-005

Gebinde	VE	Inhalt	Größe	PZN	Art. Nr.
Packung	24	10 Tücher	20 x 30 cm	18649735	00-604DW1-To10-01



100 % recyclebare
Verpackungsfolie



DESODERM CARE WIPES

Pflegende Reinigungstücher für empfindliche Haut

- Schonende Reinigung und Pflege besonders empfindlicher Haut
- Extra weiches Vliesmaterial ermöglicht eine sanfte Reinigung
- Alkohol- und parfümfrei
- Wiederverschließbarer Deckel verhindert Austrocknen der Tücher
- Getestet und empfohlen vom Deutschen Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB)

DESODERM CARE WIPES sind für die schonende Reinigung und Pflege von besonders empfindlicher Haut geeignet. Die Tränkflüssigkeit von DESODERM CARE WIPES enthält ein mildes Reinigungstensid auf pflanzlicher Basis und pflegende Inhaltsstoffe wie Aloe Vera, Allantoin und Glycerin. Aufgrund dieser Inhaltsstoffe besitzen DESODERM CARE WIPES nicht nur reinigende, sondern auch pflegende und hautberuhigende Eigenschaften. Die Tücher sind sehr weich und angenehm auf der Haut und ermöglichen so eine sanfte Reinigung. Dadurch sind sie auch zur Anwendung bei Babys und Kleinkindern geeignet. Sie lassen sich einzeln aus der praktischen Packung mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

Gebinde	VE	Inhalt	Größe	PZN	Art. Nr.
Packung	12	80 Tücher	18 x 20 cm	18410661	00-639NK-To80



KRINKO-GERECHTE AUFBEREITUNG
MIT ULTRASOL OXY SACHETS

ECO WIPES

Mehrweg-Vliestuchspendersystem

- Zur Befüllung mit ECO WIPES Vliestüchern und Trängung mit geeigneten Flächendesinfektionsmitteln
- Jede Tuchrolle wird mit den ULTRASOL OXY Sachets zur KRINKO-gerechten Eimeraufbereitung geliefert
- Strapazierfähig und besonders reißfest

ECO WIPES ist ein Mehrweg-Vliestuchspendersystem zur Desinfektion und Reinigung von Flächen aller Art. ECO WIPES bestehen aus einem Mehrweg-Vliestuchspender sowie entsprechenden Vliestuchrollen zum Nachfüllen. Sie können sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten verwendet werden und bieten somit eine hohe Flexibilität. Allen Tücherrollen liegen unsere ULTRASOL OXY Sachets bei, die eine KRINKO-gerechte Aufbereitung vor Wiederbefüllung des Vliestuchspenders ermöglichen.

Gebinde	VE	Inhalt	Größe	PZN	Art. Nr.
Spender	1	unbefüllt	-	14374974	00-915-SE001
Spender	6	unbefüllt	-	14374939	00-915-SE002
Spender, eckig	1	unbefüllt	-	14374945	00-915-SE003
Wandhalter	1	-	-	-	00-902-EIM
Tücherrolle	3	100 Tücher	30 x 32 cm	14374879	00-915-REW10003-01
Tücherrolle	6	100 Tücher	30 x 32 cm	14374885	00-915-REW10006-01
Tücherrolle	6	120 Tücher	17,5 x 36 cm	14374856	00-915-BW12006-01
Tücherrolle	3	50 Tücher	30 x 32 cm	14374862	00-915-REW5003-01

ONE SYSTEM +PLUS

Effizient. Hygienisch. Innovativ.



- **Innovatives Design für besonders einfache Handhabung**
- **100% recyclingfähiger Eimer**
- **Einsatzbereit nach 15 Minuten¹ – auch in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko – bei bis zu 60 Tagen¹ Standzeit**
- **Mit umklappbarem Henkel**
- **Große und wiederverschließbare Öffnung zur einfachen Befüllung**



Einweg-Vliestuchspendersystem zur Befüllung mit Desinfektionsmitteln¹

ONE SYSTEM PLUS ist ein innovatives und bewährtes Einweg-Wischtuchspendersystem zur Tränkung mit Flächendesinfektionsmitteln zur Desinfektion und Reinigung nichtinvasiver und invasiver Medizinprodukte. ONE SYSTEM PLUS ermöglicht eine praxisnahe und zeitsparende Anwendung. Das System ist bereits mit einer PET-Vliestuchrolle ausgestattet, sodass die Anwender direkt nach Befüllen mit dem Desinfektionsmittel und einer 15-minütigen Vortränkzeit die gewünschte Desinfektionsmaßnahme durchführen können. Im Einsatz mit Dr. Schumacher Produkten kann ONE SYSTEM PLUS statt der marktüblichen 28 Tage über einen Zeitraum von bis zu 60 Tagen¹ verwendet werden. Ist die Vliestuchrolle aufgebraucht, wird das System nicht aufbereitet, sondern kann restentleert direkt entsorgt werden. ONE SYSTEM PLUS ist zum einmaligen Gebrauch konzipiert und schließt mögliche Kontamination durch Aufbereitung und Wiederverwendung aus. Entsprechend eignet sich das System neben allen üblichen Einsatzbereichen im Gesundheitswesen insbesondere für Bereiche mit besonderem Infektionsrisiko.

Desinfektionsmittel	Standzeit ¹	4-Felder-Test ²	Verwendung auch in Bereichen mit besonderem Infektions-risiko		
ULTRASOL OXY	60 Tage	●	●		
OPTISAL PLUS	42 Tage	●	●		
DESCOCEPT SENSITIVE	42 Tage	●	●		
ONE SYSTEM PLUS kann mit weiteren Produkten von Dr. Schumacher angewendet werden, u. a. BIGUANID FLÄCHE NR, CLEANISEPT, OPTISAL N.					
Gebinde	VE	Inhalt	Größe	PZN	Art. Nr.
ONE SYSTEM PLUS	2	100 Blatt	30 x 32 cm	15190609	00-915-OSEE100-01

¹ Im Vergleich zu anderen gängigen Flächendesinfektionsmitteln mit einer Standzeit von 28 Tagen und einer Vortränkzeit von 30 Minuten erreichen die getesteten, VAH-gelisteten Flächendesinfektionsmittel aus dem Hause Dr. Schumacher eine Vortränkzeit von nur 15 Minuten und eine bis zu 42 bzw. 60 Tagen verlängerte Standzeit des befüllten Systems.

² geprüft mit allen obligatorischen Testkeimen der EN 16615 (Bakterizidie/Levurozidie)

³ gem. Mitteilung der Desinfektionsmittel-Kommission im VAH unter Mitwirkung der „4+4-Arbeitsgruppe“: Zur Verwendung von Tuchspendersystemen in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko, Hyg Med 2014; 39 - 9.

GREEN LINE



VAH

IHO

ÖGHMP

HACCP



PRESERVE

DESCOCEPT SENSITIVE PRODUKTFAMILIE

Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit und ohne mechanische Einwirkung

- **Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung**
- **Ideal für die Desinfektion nichtinvasiver Medizinprodukte sowie Flächen in hygienisch sensiblen und patientennahen Bereichen**
- **Gute Materialverträglichkeit bei vergleichsweise geringem Ethanolanteil**
- **Vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf Oberflächen und Medizinprodukten**

Im patientennahen Umfeld ist eine schnelle und wirksame Desinfektion unerlässlich. Die DESCOCEPT SENSITIVE Produktfamilie bietet mit unterschiedlichen Applikationsformen und Gebindegrößen maximale Flexibilität für die Anwender. DESCOCEPT SENSITIVE ist eine Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit und ohne mechanische Einwirkung. Das Produkt ist geeignet für Bereiche im patientennahen Umfeld, in denen ein umfassendes Wirkungsspektrum erforderlich ist. Neben einer wirksamen Desinfektion innerhalb kurzer Zeit, weist das Produkt eine gute Materialverträglichkeit auf. DESCOCEPT SENSITIVE WIPES und DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL sind Tücher zur Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung. DESCOCEPT SENSITIVE WIPES sind in zwei verschiedenen Vliestypen erhältlich: dem bewährten PET-Vlies und unserem innovativem Bio Vlies. Das Bio Vlies besteht zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen und ist biologisch abbaubar. Durch die einzigartige Rezeptur und optimierte Oberflächenstruktur nimmt das Tuch Schmutz besser auf und reinigt Oberflächen effizient und wirksam. DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL eignen sich besonders für große Flächen. Die Tücher lassen sich einzeln aus den praktischen Packungen mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen. DESCOCEPT SENSITIVE WIPES und DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL basieren auf einer optimal aufeinander abgestimmten Kombination von Tuchmaterial und Tränkflüssigkeit. Dadurch ist eine wirksame Desinfektion innerhalb kurzer Zeit möglich, wobei auch empfindliche Flächen und Materialien schonend behandelt werden. Descocept Sensitive sind dermatologisch getestet.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten von DESCOCEPT SENSITIVE

	PREVENT	PRESERVE	PROTECT
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion mit und ohne Mechanik	2 min ¹ 5 min ²	3 min ¹ 5 min ²	
Anwendungsempfehlung zur tuberkuloiden Flächendesinfektion mit und ohne Mechanik		1 min	

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten von DESCOCEPT SENSITIVE WIPES/XL

	PREVENT	PRESERVE	PROTECT
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion	2 min	3 min	
Anwendungsempfehlung zur tuberkuloiden Flächendesinfektion		3 min	

Gebinde	VE	Inhalt	Größe	PZN	Art. Nr.
Flasche	20	500 ml		16943815	00-323DS-005
Sprühflasche	6	750 ml		18841409	00-323DS-0075-02
Flasche	10	1 L		15573233	00-323DS-010
Kanister	3	2,5 L		17397869	00-323DS-025
Kanister	3	5 L		15573196	00-323DS-050
Kanister	1	10 L		15573204	00-323DS-100
Packung (PET-Vlies)	9	60 Tücher	20 x 22 cm	17195976	00-323DS-To60
Packung (Bio Vlies)	6	100 Tücher	20 x 22 cm	14307328	00-323DS-T100
Vliestuchspender	4	120 Tücher	17,5 x 36 cm	18386833	00-323DS-OSEB120

Zusammensetzung – 100 g Lösung enthalten

45 g Ethanol

¹ Wischdesinfektion ² Sprühdesinfektion

Prevent – begrenzt viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. Preserve – begrenzt viruzid PLUS sowie bakterizid, levurozid wirksam. Protect – viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

VAH

IHO

ÖGHMP

HACCP

**PRESERVE**

OPTISAL® PLUS

Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung

- Kompatibel auch mit hohen Wasserhärten
- Hohe Effizienz durch breites Wirkspektrum (s. Tabelle)
- Geeignet für alkoholempfindliche Flächen
- Gute Reinigungs- und Desinfektionsleistung
- Anwendbar im Lebensmittelbereich durch HACCP-Konformität

OPTISAL PLUS ist eine Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung. Das Produkt eignet sich außerdem gut zur Desinfektion und Reinigung von Flächen im patientennahen Umfeld und Oberflächen in öffentlichen Bereichen. OPTISAL PLUS zeichnet sich durch eine gute Reinigungsleistung sowie ein speziell für die Routineanwendung abgestimmtes Wirkspektrum aus. Neben der Wirksamkeit gegen behüllte Viren (HBV, HIV, HCV) verfügt OPTISAL PLUS über eine hohe Wirksamkeit gegen unbehüllte Viren wie Adeno-, Noro- und Rotaviren. OPTISAL PLUS zeigt ebenfalls eine gute Wirksamkeit gegen Mykobakterien sowie Schimmelpilze. Aufgrund der oberflächenaktiven Wirkstoffformulierung ist in der Praxis von einer Remanenzwirkung nach dem Abtrocknen auszugehen. OPTISAL PLUS ist geruchsneutral und parfümfrei.

Zusammensetzung – 100 g Lösung enthalten

7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
6,6 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid
2,3 g Didecylmethylammoniumchlorid

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

	PREVENT	PRESERVE	PROTECT
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion	2,5 % – 5 min 0,5 % – 60 min	2 % – 30 min 1 % – 60 min	
Anwendungsempfehlung zur tuberkuloiden Flächendesinfektion		1,5 % – 60 min	

Prevent – begrenzt viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Preserve** – begrenzt viruzid PLUS sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Protect** – viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



THERMO CLEAR

Spezialklarspüler für thermische Steckbeckenautomaten

- Verhindert Verkalkung der Steckbeckenspülen
- Fördert eine rückstandsfreie Trocknung des Spülguts
- Schaumarm

THERMO CLEAR ist geeignet zur sauren thermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbeckenspülen. Es erzielt eine rückstandsfreie Trocknung des Spülguts, verhindert eine Verkalkung der Steckbeckenspülen und ist schaumarm eingestellt. THERMO CLEAR ist biologisch abbaubar gemäß Detergenzienverordnung, da es auf Zitronensäure-Basis aufgebaut ist.

Anwendungs- und Dosierempfehlung zur Reinigung

Je nach Automatentyp und Wasserhärte.

1 – 3 ml/L (siehe Herstellerangaben)
(0,1 – 0,3 %)

Zusammensetzung – 100 g Lösung enthalten

< 30 % organische Säuren
Komplexbildner
Korrosionsinhibitoren

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Flachkanister	3	5 L	16202361	00-127-050
Kanister	3	5 L		00-127-050AT



THERMO ALKA CLEAR

Spezialklarspüler für thermische Steckbeckenautomaten

- Verhindert Verkalkung der Steckbeckenspülen
- Fördert eine rückstandsfreie Trocknung des Spülguts
- Schaumarm

THERMO ALKA CLEAR ist geeignet zur alkalischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbeckenspülen führender Hersteller. Es gewährleistet eine schnelle und rückstandsfreie Trocknung des Spülguts, reduziert eine Verkalkung der Steckbeckenspülen und ist schaumarm eingestellt.

Anwendungs- und Dosierempfehlung zur Reinigung

Je nach Automatentyp und Wasserhärte

1 – 4,5 ml/L (siehe Herstellerangaben)
(0,1 – 0,45 %)

Zusammensetzung – 100 g Lösung enthalten

15 – 30 % Polyacrylat

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Kanister	3	4,25 L	16202355	00-137-050

Anwendungsempfehlung für die maschinelle Aufbereitung.

Schnell. Leistungsstark. Wirtschaftlich.

Abgestimmte Systemlösungen für effiziente Prozesse in der Aufbereitung von Spülgut für menschliche Ausscheidungen. Spezialklarspüler für die Anwendung in Steckbeckenautomaten verschiedener Hersteller.

Die langjährige Anwendungspraxis zeigt, dass die Dr. Schumacher Produkte THERMO CLEAR und THERMO ALKA CLEAR problemlos und zuverlässig mit den Produkten der unten genannten Hersteller eingesetzt und kombiniert werden können. Entsprechende Anwendungserfahrungen bilden die Grundlage dieser Empfehlung.



Spezialklarspüler

THERMO CLEAR

Hersteller Steckbeckenautomat

MEIKO
Lischka
Kodra
Discher
AT-OS
Miele



Spezialklarspüler

THERMO ALKA CLEAR

Hersteller Steckbeckenautomat

Arjo
Geringe
Horcher
Erlen
bg edelstahl



PLURAZYME® EXTRA

Multi-enzymatischer Reiniger zur Aufbereitung chirurgischer Instrumente und Endoskope

- **Aktive Reinigung und angenehmer Duft erleichtern Aufbereitung**
- **Werterhalt der Instrumente durch neutralen pH und abgestimmten Reinigungskomplex**
- **Sehr gute nicht-fixierende Reinigung¹ – passend zur Vorreinigung**

PLURAZYME EXTRA ist ein gut geeignetes Reinigungskonzentrat für die manuelle Aufbereitung einer Vielzahl von Medizinprodukten. Die umfangreiche Materialverträglichkeit ermöglicht die Reinigung von chirurgischen Instrumenten, starren und auch flexiblen Endoskopen. Dabei sorgen der Duft und die hohe Reinigungskraft für eine angenehme Anwendung, ob im Tauchbad oder Ultraschallbad. Die aktive Formel aus 3 Enzymen und nichtionischen Tensiden durchdringt und löst ein breites Spektrum an organischen Verunreinigungen von geronnenem Blut, über Schleim bis hin zu Fett – ohne zu fixieren. Die Kompatibilität mit anderen Reinigern und Desinfektionsmitteln sorgt für eine unkomplizierte und flexible Integration von PLURAZYME EXTRA in ihre Prozesse.

Anwendungs- und Dosierempfehlung zur Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad 0,4 – 2 % (4 ml/L – 20 ml/L) max. 40 °C mind. 5 min

Empfehlung für Ultraschallbäder 0,25 % (2,5 ml/L) max. 40 °C mind. 5 min

Zusammensetzung – 100 g Lösung enthalten

5 – 15 % nichtionische Tenside

Enzyme

Konservierungsmittel

Duftstoffe

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Spenderflasche	12	1 L	16777021	00-138-010
Dosierflasche	10	1 L	19172821	00-138-010-01
Flasche	6	2 L	16777038	00-138-020-02
Kanister	3	5 L	16777044	00-138-050-02

¹ interne Testergebnisse

Prevent – begrenzt viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Preserve** – begrenzt viruzid PLUS sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Protect** – viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

VAH

IHO

ÖGHMP



PROTECT

PERFEKTAN® ACTIVE

Instrumentendesinfektion für invasive Medizinprodukte

- **Sehr gute Materialverträglichkeit²**
- **Schnelle Desinfektion durch oxidatives Wirksystem**
- **Für flexible Endoskope geeignet**

PERFEKTAN ACTIVE ist ein gut und vollständig lösliches Pulver und daher zuverlässig und sicher anzuwenden. Auf Basis des in der mildalkalischen Anwendungslösung generierten Wirkstoffs Peressigsäure erreicht PERFEKTAN ACTIVE ein maximales Wirkungsspektrum³ bei gleichzeitig sehr guter Materialverträglichkeit², selbst bei sensiblen Materialien wie z. B. Silikon oder bei flexiblen Endoskopen. Das oxidative Wirksystem von PERFEKTAN ACTIVE liefert durch Peressigsäure eine effiziente Desinfektion, welche vollständig zu Wasser, Essigsäure und Sauerstoff abreagiert.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

	PREVENT	PRESERVE	PROTECT
Anwendungsempfehlung zur Instrumentendesinfektion:			
bakterizid, levurozid			1 % - 5 min
sporizid, viruzid			2 % - 15 min
tuberkulozid (M. terrae), mykobakterizid (M. terrae, M. avium)			2 % - 30 min.
fungizid			3 % - 60 min

Zusammensetzung

Wirkstoff: Peressigsäure (in-situ) > 850 ppm (1 %ige Lösung), Wasserstoffperoxid

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Sachet	100	40 g	10966229	00-155-0004
Eimer	6	1 kg	10966241	00-155-010

² getestet für gängige Metalle, Elastomere und Thermoplaste bei Medizinprodukten.

³ bakterizid, levurozid, tuberkulozid (M. terrae), sporizid, viruzid, mykobakterizid (M. terrae, M. avium), fungizid

Prevent – begrenzt viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Preserve** – begrenzt viruzid PLUS sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Protect** – viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam.

Dr. Schumacher – Ihr Partner für Hygienesdienstleistungen



EQmed steht für professionelle und kompetente Dienstleistungen rund um das Thema Hygiene. Seit über 20 Jahren sind wir die Marke für Expertise und Qualität im Service-Segment der Dr. Schumacher GmbH.

Wir informieren Sie über wesentliche Inhalte, fachliche Standards, gesetzliche Grundlagen und geben neue Denk- und Handlungsanstöße. Unser Ziel ist es, unter Einbeziehung Ihrer individuellen Situation umfassend und effizient zu beraten.

Wir ermitteln in enger Zusammenarbeit mit Ihnen den jeweiligen Bedarf Ihrer Einrichtung und erarbeiten individuell darauf abgestimmte Lösungen und Konzepte.

Informieren Sie sich hier über die Angebote der EQmed:

www.eqmed.de

Unsere Serviceleistungen im Überblick:

- Hygienestatuserhebung: Beratung und Begleitung vor Ort
- Erstellung von einrichtungsspezifischen Hygienehandbüchern bzw. Hygieneplänen
- Erstellung von Desinfektions- und Hautschutzplänen
- Umfassendes Schulungsangebot digital oder vor Ort



A healthcare worker, likely a nurse, is shown in profile, wearing a light blue protective gown, a surgical mask, and blue gloves. She is leaning over a hospital bed, adjusting a white pillow. The bed is covered with a patterned blanket and has a control panel on the side. In the background, there is a window with blinds and a white cabinet. A bright pink banner with white text is overlaid on the lower part of the image.

AUSBRUCHSFALL

Vorbereitet sein für den Ausbruchsfall



Kommt es in Pflegeheimen zu einem Infektionsausbruch, ist schnelles und konsequentes Handeln gefragt. Wir haben für Sie die passenden Produktlösungen ausgewählt, mit denen Sie im Ausbruchsfall die Gesundheit Ihrer Kolleginnen und Kollegen sowie die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner schützen. Alle unsere aufgeführten Desinfektionsprodukte haben ein umfassendes Wirkungsspektrum und wirken innerhalb kurzer Zeit. Damit Sie schnell reagieren können und der Ausbruchsfall nicht zur Regel wird.



VAH

IHO

HACCP

ASEPTOMAN® FORTE

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel

- **Volle Viruzidie gem. EN14476 innerhalb von 30 Sekunden**
- **Chirurgische Händedesinfektion in 1,5 Min.**
- **Patentierter Kombination von Alkohol und Rückfettersystem – für eine viruzide Wirksamkeit bei gleichzeitiger Pflege der Haut**
- **Feuchtigkeitsspendend und pflegend durch Rückfetter und Glycerin**
- **Frei von Parfüm und Farbstoffen sowie QAV**

ASEPTOMAN FORTE ist ein viruzides, ethanolisches Händedesinfektionsmittel. ASEPTOMAN FORTE erzielt dank einer patentierten Formulierung ein breites Wirkspektrum trotz des vergleichsweise niedrigen Alkoholgehalts¹. Begrenzt viruzid PLUS und viruzid (gemäß EN 14476) innerhalb von 30 Sekunden. Durch ein bewährtes Rückfettersystem erhöht ASEPTOMAN FORTE die Hautfeuchte nachweislich.

**PROTECT**

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

	PREVENT	PRESERVE	PROTECT
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion	30 s	30 s	30 s
Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion	1,5 min	1,5 min	1,5 min

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Kittelflasche	25	50 ml		00-485OP-0005-01
Kittelflasche	20	100 ml	15190561	00-485OP-001
Kittelflasche	20	150 ml	16821130	00-485OP-0015
Spenderflasche	20	500 ml	15190578	00-485OP-005-01
ESH Vacu-Bag kurze Pumpe	8	700 ml	20407755	00-485OP-Boo7
ESH Vacu-Bag lange Pumpe	8	700 ml	20407761	00-485OP-Boo7L
Spenderflasche	12	1 L	19228993	00-485OP-010-01
Kanister	3	5 L	15190590	00-485OP-050-01

Zusammensetzung – 100 g Lösung enthalten

85 g Ethanol

¹ verglichen mit anderen viruziden Händedesinfektionsmitteln **Prevent** – begrenzt viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Preserve** – begrenzt viruzid PLUS sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Protect** – viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

RKI AB

RKI/DVV

VAH

IHO

ÖGHMP

HACCP

ULTRASOL® ACTIVE

Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung

- **Zuverlässige Desinfektion auch im Seuchenfall**
- **Breites Wirkungsspektrum** (s. Tabelle) **für hohe Wirksamkeitsanforderungen**
- **Gute Materialverträglichkeit und Kompatibilität mit anderen Desinfektionswirkstoffen aufgrund von oxidativer Basis**
- **Geeignet zur Schlussdesinfektion**

ULTRASOL ACTIVE ist eine Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung. Das Pulverkonzentrat eignet sich für die Desinfektion und Reinigung von Flächen aller Art und bietet ein breites Wirkungsspektrum (s. Tabelle). ULTRASOL ACTIVE ist ein praktisch staubfreies Pulver, das einfach und zuverlässig dosiert werden kann. ULTRASOL ACTIVE ist RKI AB-gelistet und eignet sich sowohl zur Flächenwischdesinfektion dort, wo in der Routine erhöhte Wirksamkeitsanforderungen bestehen, als auch zur Desinfektion im Seuchenfall. Das Produkt bietet eine gute Materialverträglichkeit sowie eine gute Reinigungsleistung. Die Wirksamkeit von ULTRASOL ACTIVE ist auch bei hohen organischen Belastungen gewährleistet und angetrocknete Blutreste können mühelos und sicher entfernt werden.



Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

	PREVENT	PRESERVE	PROTECT
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion	1 % – 5 min 0,5 % – 15 min	1 % – 5 Min 0,5 % – 15 Min	2 % – 15 min 1 % – 60 min
Anwendungsempfehlung zur tuberkuloziden Flächendesinfektion		2 % – 15 min, 1 % – 60 min	
Anwendungsempfehlung zur sporiziden Flächendesinfektion		2 % – 15 min, 1 % – 30 min	

Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
Sachet	100	40 g	18220280	00-255-0004
Dose	6	1 kg	10110149	00-255-010

Zusammensetzung – 100 g Lösung enthalten

Wirkstoff: > 750 ppm Peressigsäure, hergestellt aus Tetraacetylenhildiamin (250 g/kg) und Natriumpercarbonat (450 g/kg). Der Wirkstoff wird bei Lösen des Produkts in Wasser gebildet (in-situ, 10 g/l für 1 %ige Lösung)

1 verglichen mit anderen viruziden Händedesinfektionsmitteln **Prevent** – begrenzt viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Preserve** – begrenzt viruzid PLUS sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Protect** – viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

VAH

IHO

ÖGHMP

HACCP



ULTRASOL OXY® PRODUKTFAMILIE

Oberflächendesinfektion und -reinigung invasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung

- Breites Wirkungsspektrum inkl. Viruzidie und Sporizidie nach neusten Normen (s. Tabelle)
- Hohe Materialverträglichkeit aufgrund oxidativer Basis
- Geeignet für effektive Desinfektionsmaßnahmen im Lebensmittelbereich
- Direkt entnehmbare Tücher im wiederverschließbaren Gebinde

Die ULTRASOL OXY Produkte sind gebrauchsfertige Desinfektionsmittel auf oxidativer Basis zur Oberflächendesinfektion und -reinigung invasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung. Die Produkte eignen sich gut in Bereichen mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung und weisen ein umfangreiches Wirkspektrum (s. Tabelle) gegen Bakterien und Viren inklusive Sporen auf. Die ULTRASOL OXY Produkte sind als flüssiges Schnelldesinfektionsmittel und als gebrauchsfertige Desinfektionstücher erhältlich. ULTRASOL OXY und ULTRASOL OXY WIPES/XL zeichnen sich aufgrund der oxidativen Basis durch eine gute Materialverträglichkeit aus. Damit ist ULTRASOL OXY auf nahezu allen Materialien anwendbar. Unsere ULTRASOL OXY WIPES XL eignen sich durch die größeren Tücher besonders gut für die Desinfektion von großen Flächen.

Hauptwirkstoffe – 100 g Lösung enthalten

7 g Wasserstoffperoxid

0,1 g Peressigsäure



Jetzt Biozidprodukt und Medizinprodukt¹.
Viruzid und sporizid.
Für Routine und Ausbruchsfall.

PROTECT

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten ULTRASOL OXY

	PREVENT	PRESERVE	PROTECT
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion	1 min	1 min	5 min
Anwendungsempfehlung zur tuberkuloziden Flächendesinfektion			5 min
Anwendungsempfehlung gegen Clostridioides difficile			5 min
Anwendungsempfehlung zur sporiziden Flächendesinfektion			15 min

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten ULTRASOL OXY WIPES / WIPES XL

	PREVENT	PRESERVE	PROTECT
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion	5 min	5 min	5 min
Anwendungsempfehlung zur tuberkuloziden Flächendesinfektion			5 min
Anwendungsempfehlung gegen Clostridium difficile			5 min
Anwendungsempfehlung zur sporiziden Flächendesinfektion			15 min

Gebinde	VE	Inhalt	Größe	PZN	Art. Nr.
Flasche	6	2L		18703104	00-270-020
Packung	6	72 Tücher	20 x 20 cm	20131945	00-270-T072
Standbodenbeutel	4	120 Tücher	17,5 x 36 cm	18703096	00-270-OSEB120

¹ Zugelassen als Biozidprodukt und Medizinprodukt der Klasse IIb. **Prevent** – begrenzt viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Preserve** – begrenzt viruzid PLUS sowie bakterizid, levurozid wirksam. **Protect** – viruzid sowie bakterizid, levurozid wirksam. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**Starke
Lösung.**

SPORIZID LEISTUNGSSTARK ULTRASOL OXY®

Viruzid nach EN 14476

Sporizid nach EN 17846 (*C. Diff*)

**Sporizid nach EN 17126
(*B. Subtilis* u. *B. Cereus*)**

Dr. Schumacher

73

In der Routine und im Ausbruchsfall

Die hygienischen Anforderungen in sensiblen patientennahen Bereichen sind besonders streng. Mit der **ULTRASOL OXY** Familie bietet Dr. Schumacher eine entsprechende Produktreihe auf Basis der Wirkstoffe Peressigsäure und Wasserstoffperoxid. Neben der Sporizidie verfügen die Produkte über ein umfangreiches Wirkungsspektrum (s. Tabelle). Dies gilt sowohl für die Routine als auch für den Ausbruchsfall. Die gute Materialverträglichkeit und die schnellen Einwirkzeiten (s. Tabelle) machen den Einsatz der Produkte besonders effizient und anwenderfreundlich. Mit dieser nachhaltigen Lösung entspricht Dr. Schumacher auch anspruchsvollen Hygiene- und Umweltstandards.

Sporizide Desinfektion im patientennahen Umfeld

Risikobereiche in der ambulanten und stationären Pflege sowie in Einrichtungen der Behindertenhilfe unterliegen speziellen und sehr strengen Hygieneanforderungen. Externe Besuche bilden zudem ein erweitertes Infektionsrisiko. Die Einhaltung dieser Anforderungen ist gerade für die Sicherheit gesundheitskritischer und immun-supprimierter Bewohnerinnen und Bewohnern elementar. Flächen und Bereiche, die häufigem Haut- und Händekontakt ausgesetzt sind, erfordern eine besondere Sorgfalt bei der Desinfektion, um den Ausbruch nosokomialer Infektionen möglichst zu verhindern.

Infektionsprävention auf hohem Niveau

Patienten- und bewohnernahe Flächen sind insbesondere im pflegerischen Umfeld und in den Einrichtungen des Gesundheitswesens sehr hygiensensibel. Daher bedürfen sie einer sorgfältigen Reinigung und Desinfektion. Denn gerade hier ist das Risiko der Übertragung von pathogenen Keimen und Krankheitserregern besonders hoch. Durch die in den **ULTRASOL OXY** Produkten zum Einsatz kommenden Wirkstoffe Peressigsäure und Wasserstoffperoxid werden Flächen mit mechanischer Einwirkung gereinigt und desinfiziert. Infektionsrisiken können so deutlich gesenkt werden.





SPE ALU FLEX

Universeller Armhebelspender für hohe Flexibilität

Unsere Spenderinnovation SPE ALU FLEX ist sowohl mit dem 700 ml ESH Vacu-Bag als auch mit gängigen 500 und 1.000 ml Flaschen kompatibel. Damit ist ein schrittweiser Systemwechsel problemlos möglich. Die werkzeuglose Bestückung, wischdesinfizierbare Oberflächen und farbige Tropfschalen zur Unterscheidung der Produkte machen den SPE ALU FLEX zu einem anwenderfreundlichen Hygienehelfer

Gebinde	VE	Größe	Art. Nr.
SPE ALU FLEX			
SPE ALU FLEX	1	500 ml/700 ml/1 L	00-907-KOMB
Zubehör			
SPE ALU FLEX			
ESH-Adapter für SPE ALU FLEX			00-907-KOMB-01
Verschlussblende für SPE ALU FLEX			00-907-KOMB-02
Flaschenklemme für 500 ml Flaschen			00-907-KOMB-03
Tropfschalenwinkel			00-907-KOMB-04
Einweg-Kunststoffpumpe für SPE, 500 ml			00-918-105
Einweg-Kunststoffpumpe für SPE, 1000 ml			00-918-110
Tropfschale weiss, universell			00-918-205
Tropfschale grün, Waschlotion			00-918-205GR
Tropfschale blau, Händedesinfektion			00-918-205BL
Tropfschale gelb, Hautpflege			00-918-205GE
Tropfschale rot, Hautschutz			00-918-205RO



SPE 500/1000

Kunststoffarmhebel-Wandspender

Armhebel-Wandspender mit integrierter Auffangschale. Verschlüsselter Spender mit Sichtfenster. Geeignet für 500 ml- bzw. 1 L-Spenderflaschen sowie 700 ml ESH Vacu-Bags. Die Dosiermenge beträgt ca. 1,8 ml/Hub, reduzierbar in drei Stufen.



RX5 TOUCHLESS

Automatischer Kunststoffspender

Automatischer Kunststoffspender mit optionaler Auffangschale. Der Spender kann freistehend oder als Wandspender genutzt werden. Geeignet für 700 ml ESH Vacu-Bags und 500 ml Spenderflaschen. Die Dosiermenge beträgt ca. 1,5 ml/Hub.

Gebinde	VE	Größe	Art. Nr.
SPE 500/1000			
Wandspender	1	500 ml	00-918-005
Wandspender	1	1 L	00-918-010
Zubehör			
SPE 500/1000			
Einweg-Kunststoffpumpe für SPE, 500 ml			00-918-105
Tropfschale für Wandspender SPE, 500 ml/1000 ml			00-918-205
ESH-Adapter für SPE 500			00-918-KOMB-01
Tropfschale weiss, universell			00-918-205
Tropfschale grün, Waschlotion			00-918-205GR
Tropfschale blau, Händedesinfektion			00-918-205BL
Tropfschale gelb, Hautpflege			00-918-205GE
Tropfschale rot, Hautschutz			00-918-205RO

Gebinde	VE	Größe	Art. Nr.
RX5			
Touchless Kunststoffspender 500 ml/700 ml	1	500 ml/700 ml	00-911-005RXT
Zubehör			
RX5			
Einwegpumpe RX5 Kunststoff			00-901-505-RX5M
Tropfschale weiss, universell			00-911-205RXT
Tropfschale grün, Waschlotion			00-911-205RXTGR
Tropfschale blau, Händedesinfektion			00-911-205RXBL
Tropfschale gelb, Hautpflege			00-911-205RXTGE
Tropfschale rot, Hautschutz			00-911-205RXTRO

NEU



MOBILHALTER

Zum variablen Anbringen von Spenderflaschen

- Mobilhalter aus rostfreiem Stahl
- Zum flexiblen Anbringen von Spenderflaschen
- Geeignet für 500 ml Flaschen
- Zur Anbringung an Betten, Pflegewagen, etc.
- Ermöglicht flexible Platzierung direkt am Einsatzort

Der Mobilhalter aus rostfreiem Stahl ermöglicht die flexible Platzierung von 500 ml Pumpflaschen direkt am Einsatzort. Er wird einfach und schnell an Betten, Gestellen, OP-Schienen, Pflegewagen oder ähnlichen Konstruktionen eingehängt, ganz ohne Montageaufwand. So stehen die Dr. Schumacher Hygieneprodukte jederzeit flexibel und griffbereit zur Verfügung. Arbeitsabläufe bleiben damit einfach, anwenderfreundlich und effizient.

Dank des hochwertigen Edelstahls ist der Mobilhalter stabil, langlebig und pflegeleicht. Er verfügt über eine hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche. Zudem ist der Mobilhalter spülmaschinenfest und autoklavierbar (134 °C) und erfüllt damit höchste Anforderungen an Hygiene und Aufbereitung. Der Mobilhalter eignet sich ideal für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen sowie für Industrie- und Lebensmittelbereiche.

NEU



WANDHALTER

Zur festen Installation von Spenderflaschen

- Wandhalter aus rostfreiem Stahl
- Zur festen Installation von Pumpflaschen
- Geeignet für 500 ml Flaschen
- Einfach an Wänden verschraubbar
- Ideal für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Industrie- und Lebensmittelbetriebe

Der Wandhalter aus rostfreiem Stahl mit eingepprägtem Dr. Schumacher Logo bietet eine stabile Lösung zur festen Installation von 500 ml Pumpflaschen. Er wird sicher an der Wand verschraubt und schafft klar definierte Hygienepunkte in Eingangsbereichen, Behandlungsräumen oder Produktionsstätten. Die feste Montage gewährleistet einen zuverlässigen Sitz und eine dauerhaft griffbereite Bereitstellung von Hygieneprodukten.

Das robuste, rostfreie Material ist langlebig, leicht zu reinigen, spülmaschinenfest und autoklavierbar (134 °C). Der Wandhalter ist ideal für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Industrie- und Lebensmittelbetriebe sowie öffentliche Bereiche.

Gebinde	VE	Größe	Art. Nr.
Mobilhalter	1	500 ml	00-902-MH-01

Gebinde	VE	Größe	Art. Nr.
Wandhalter	1	500 ml	00-902-WH-02



DESIPOINT

Vormontierte mobile Standsäule für Dosierspender

Diese Desinfektionssäule eignet sich ideal für Eingangsbereiche oder andere Orte, an denen eine Wandanbringung von Spendern nicht erwünscht oder möglich ist. DESIPOINT gewährleistet einen einfachen Zugang zum Händedesinfektionsmittel und ist besonders anwenderfreundlich. Das Dr. Schumacher Logo ist in die Säule eingefräst. DESIPOINT ist eine hygienische Edelstahlkonstruktion für eine schnelle und einfache Spendermontage, welche mit handelsüblichen Spendern kombinierbar ist (Spender nicht im Lieferumfang enthalten).

DESCOMAT VARIO

Dosieranlage


- Mikroprozessorgesteuert
- Zwei frei einstellbare Mengen-Konzentrations-Variationen
- Zertifiziert nach RKI-Richtlinie



Der DESCOMAT VARIO bietet den Vorteil, ein Produkt mit zwei frei einstellbaren Mengen-Konzentrations-Variationen zu programmieren. Das Display informiert den Anwender über die eingestellten Konzentrationen und Mengen. Damit kann ein Produkt in verschiedenen Risikobereichen oder mit unterschiedlichen Leistungswerten eingesetzt werden.

Gebinde	VE	Größe	Art. Nr.
Standsäule, 3-teilig	1	140 cm	00-902-DS

Gebinde	VE	Größe H x B x T	Art. Nr.
Dosieranlage	1	30 x 20 x 18 cm	00-904V-DT

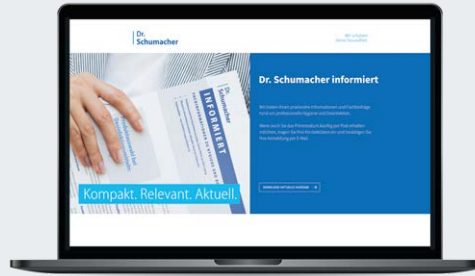

Kompakt. Relevant. Aktuell.

DR. SCHUMACHER INFORMIERT

AKTUELLE INFORMATIONEN UND FACHBEITRÄGE
RUND UM PROFESSIONELLE HYGIENE UND DESINFEKTION.



JETZT INFORMIEREN UND ABONNIEREN

dsi.schumacher-online.com

Kontakt

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld
Germany

T +49 5664 9496-0

F +49 5664 8444

info@schumacher-online.com

www.schumacher-online.com

