

HÄNDEHYGIENE MIT SYSTEM

Ganzheitliches

Händehygienekonzept (GHK)



NEU!

Unser SPE ALU FLEX Spender

Vielseitiger Hygienehelfer

Der leichte und trotzdem robuste Spender bietet perfekten Halt für unsere 700 ml fassenden ESH Vacu-Bags sowie klassische 500 ml und 1.000 ml Flaschen. Schneller Produktaustausch, komfortable Bedienung, exakte Dosierung machen den SPE ALU FLEX zu einem praktischen Hygienehelfer für den Pflegealltag. Er kann wahlweise mit Waschlotion, flüssiger Händedesinfektion oder Hautschutz- und Pflegecreme bestückt werden. Farbige Tropfschalen ermöglichen eine klare Produktunterscheidung, während die wischdesinfizierbaren Oberflächen eine einfache und effiziente Reinigung unterstützen.

**Spender-
Innovation!**



**Multikompatibel: 700 ml ESH Vacu-Bag,
500 ml und 1.000 ml Flaschen.**

GHK: Händehygiene ganzheitlich gedacht!

Produkt + Gebinde + Spender = Ganzheitliches Händehygienekonzept

Das Ganzheitliche Händehygienekonzept optimiert den Ressourceneinsatz, erhöht die Anwendersicherheit, senkt Hygienrisiken – und schafft mehr Zeit für das, was wirklich zählt: die Pflege.

Einfach. Sicher. Hygienisch. ESH Vacu-Bags®

Hohe Hygienesicherheit, minimaler Aufwand: Mit den neuen ESH Vacu-Bags verabschieden Sie sich von aufwendiger Pumpenaufbereitung und setzen auf eine anwenderfreundliche, zeitsparende Lösung. Durch die luftdicht abgeschlossene Einheit aus Pumpe und Verpackung ist eine mikrobielle Produktkontamination nahezu ausgeschlossen. Die mögliche Verwendungsdauer wird allein durch das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) des Produkts bestimmt.

Hochwertige Produkte für umfassende Händehygiene

Alles, was eine gute Händehygiene braucht: Waschlotion, Händedesinfektion, Hautschutz und -pflege. Wegen der parfüm- und farbstofffreien Formulierung bieten die Produkte eine hohe Hautverträglichkeit¹, sind speziell auch für sensible Haut zu empfehlen und entsprechen den Standards von Berufsgenossenschaft und Arbeitssicherheit².

Alle Produkte sind übrigens geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, im Rahmen eines HACCP-Konzeptes.

Jetzt im neuen benutzerfreundlichen Farbkonzept!



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

¹ Produkt ist parfüm- und farbstofffrei sowie dermatologisch getestet

² Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), Hautschutz- und Händehygieneplan für Mitarbeitende in Kranken- und Altenpflege

Ganzheitliches Händehygienekonzept (GHK): Ihre Vorteile im Überblick



Kompatibilität mit Spendern und Flaschen

- Als ganzheitliches Händehygienekonzept bei uns im Paket erhältlich: Spender SPE ALU FLEX + ESH Vacu-Bags mit hochwertigen Dr. Schumacher Produkten: Waschlotion, Händedesinfektion, Hautschutz- und Pflegecreme
- ESH Vacu-Bags kompatibel mit bereits vorhandenen, gängigen Spendensystemen wie SPE 500, ingo-man® plus, AK Plus 500/1000, AK 1000 Plus Touchless, RX Eurospendern
- SPE ALU FLEX Spender ist kompatibel mit 700 ml ESH Vacu-Bags sowie 500 ml und 1.000 ml Flaschen

Hygienische Sicherheit durch luftdicht abgeschlossenes System

- Keine Haltbarkeitseinschränkung nach Anbruch, außer Mindesthaltbarkeitsdatum
- Eine mikrobielle Kontamination des Inhalts und des Pumpensaugrohrs kann nahezu ausgeschlossen werden

Integrierter Einwegpumpkopf

- Keine zeit- und personalaufwendige Aufbereitung der Pumpe
- Keine Dokumentation der Pumpenaufbereitung oder des Pumpenwechsels

KRINKO-konforme¹ Lösung

- Einmalgebinde mit der Verwendung von Einmalpumpen, die nach Entleerung verworfen werden
- Vermeidung der mikrobiellen Kontamination des Pumpkopfs während der Nutzung möglich
- Füllstand der im Spender verwendeten Mittel ist jederzeit gut erkennbar
- Wichtige Herstellerhinweise sind erkennbar
- Fixe Außen- und Innenteile der Spender und Bedienhebel sind wischdesinfizierbar
- Spender bietet die Möglichkeit der Verwendung verschiedener Gebinde

Nachhaltige Lösung²

- Bis zu 60 % Kunststoffeinsparung pro ml Inhalt durch den ESH Vacu-Bag (im Vergleich zur 500 ml Flasche)
- CO₂-Einsparung durch geringeren Materialeinsatz, geringeres Transportgewicht und -volumen
- Bis zu 83 % reduziertes Abfallvolumen (im Vergleich zur 500 ml Flasche) beim ESH Vacu-Bag
- 98,9 % Restentleerung – nahezu vollständige Produktausnutzung³

¹ Empfehlungen der KRINKO zur Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens, Bundesgesundheitsblatt 2016, Anforderungen an Spender für Händedesinfektionsmittel und für Handwaschpräparate wie hier angegeben.

² Im Vergleich zur herkömmlichen Euroflasche

³ Eigene Erhebung

Händehygiene nach hohen Standards

KRINKO-konform'!

Nosokomiale Infektionen zählen zu den häufigsten Komplikationen im Rahmen medizinischer Behandlungen. Um diese zu verhindern und ihre Ausbreitung zu minimieren, werden in medizinischen Einrichtungen umfassende Maßnahmen ergriffen. Die konkrete Vorgehensweise zur Prävention wird von der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) vorgegeben. Dieses Expertengremium, das gemäß § 23 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) gesetzlich vorgeschrieben ist, erstellt regelmäßig Empfehlungen zur Vermeidung nosokomialer Infektionen. Die Richtlinien des Robert Koch-Instituts gelten in allen medizinischen Einrichtungen als verbindlicher Standard und sind entsprechend umzusetzen.

2016 hat die KRINKO ihre Empfehlungen zur Händehygiene für alle stationären und ambulanten Gesundheitseinrichtungen aus dem Jahr 2000 aktualisiert und erweitert.

Der **ESH Vacu-Bag®!**

Einfach.
Sicher.
Hygienisch.



KRINKO, DGKH UND INSTITUT FÜR HYGIENE UND UMWELTMEDIZIN DER UNIVERSITÄTSMEDIZIN GREIFSWALD

*„Günstig ist daher bei Spendern für Handwaschpräparate die **Verwendung von Einmalpumpen am Gebinde**, die mit dem leeren Gebinde verworfen werden.“*

KRINKO-Empfehlung zur Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI), Bundesgesundheitsblatt 2016

*„Seifen- und Händedesinfektionsmittelspender **mit Einwegpumpköpfen**, die mit dem leeren Gebinde entsorgt werden, sind zu bevorzugen.“*

Aus der gemeinsamen Empfehlung zu Anforderungen an Seifen- und Händedesinfektionsmittelspender in Einrichtungen des Gesundheitswesens der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) und des Begutachtungsausschusses der Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP), HygMed 2011; 36 (10)

*„Um das Konzept der Händehygiene ganzheitlich umzusetzen, sollten in **drei separaten Spendern** Einwegbeutel für Händedesinfektionsmittel, Waschlotion und Hautschutzlotion bereitgestellt werden.“*

Prof. Dr. Axel Kramer, Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Universitätsmedizin Greifswald, Kompakt Sonderheft M&K 9/2021

PRODUKTINFORMATION

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
DESCODERM	Spenderflasche	20	500 ml	19730824	00-401-005-02
	Spenderflasche	12	1 L	19730830	00-401-010-03
ASEPTOMAN® PARFÜMFREI	Spenderflasche	20	500 ml	09614637	00-403OP-005
	Spenderflasche	12	1 L	09614583	00-403OP-010
ASEPTOMAN® MED	Spenderflasche	20	500 ml	13420821	00-457OP-005
	ESH Vacu-Bag – kurze Pumpe	8	700 ml	19764510	00-457OP-B007
	ESH Vacu-Bag – lange Pumpe	8	700 ml	19980099	00-457OP-B007L
	Spenderflasche	12	1 L	13420809	00-457OP-010
ASEPTOMAN® DUO	Spenderflasche	20	500 ml	19301715	00-407OP-005
	Spenderflasche	12	1 L	19301738	00-407OP-010
ASEPTOMAN® PLUS	Spenderflasche	20	500 ml	20087782	00-407OP-005-30
	Spenderflasche	12	1 L	20087813	00-407OP-010-30
ASEPTOMAN® FORTE	Spenderflasche	20	500 ml	15190578	00-485OP-005-01
	ESH Vacu-Bag – kurze Pumpe	8	700 ml	20407755	00-485OP-B007
	ESH Vacu-Bag – lange Pumpe	8	700 ml	20407761	00-485OP-B007L
	Spenderflasche	12	1 L	19228993	00-485OP-010-01
ASEPTOMAN® VIRAL	Spenderflasche	20	500 ml	09612377	00-410OP-005
	Spenderflasche	12	1 L	09612383	00-410OP-010
ASEPTOMAN® GEL	Spenderflasche	20	500 ml	10109086	00-409-005-01
	Spenderflasche	12	1 L	10109092	00-409-010-01
DESCOLIND COMFORT WASH	Spenderflasche	20	500 ml	16660862	00-607-005-01
	Spenderflasche	12	1 L	16660856	00-607-010-01
DESCOLIND COMFORT LIGHT CREAM	Spenderflasche	20	500 ml	16660997	00-602-005-03
DESCOLIND PURE WASH	Spenderflasche	20	500 ml	16674930	00-631OP-005-01
	ESH Vacu-Bag – kurze Pumpe	8	700 ml	19764527	00-631OP-B007
	ESH Vacu-Bag – lange Pumpe	8	700 ml	19980107	00-631OP-B007L
	Spenderflasche	12	1 L	16674924	00-631OP-010-01
DESCOLIND PURE LIGHT CREAM	Spenderflasche	20	500 ml	16660827	00-602DS-005
DESCOLIND PURE INTENSIVE CREAM	Spenderflasche	20	500 ml	16674999	00-622IS-005
DESCOLIND EXPERT WASH	Spenderflasche	20	500 ml	16660945	00-614-005-03
	Spenderflasche	12	1 L	16660916	00-614-010-03
DESCOLIND EXPERT LIGHT CREAM	Spenderflasche	20	500 ml	16660974	00-620HC-005-01
DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM	Spenderflasche	20	500 ml	16674901	00-623-005-01
	ESH Vacu-Bag – kurze Pumpe	8	700 ml	19764496	00-623-B007
	ESH Vacu-Bag – lange Pumpe	8	700 ml	19980082	00-623-B007L

**Das können Sie mit dem GHK sparen:
Berechnen Sie Ihre Personalkosten- und Kunststoffersparnis!**



ghk.schumacher-online.com

WANDSPENDER & ZUBEHÖR

SPE 500	VE	Art. Nr.
Kunststoffspender SPE 500	1	00-918-005
Einweg-Kunststoffpumpe für SPE, 500 ml	1	00-918-105
ESH-Adapter für SPE 500	1	00-918-KOMB-01
Tropfschale weiss, universell	1	00-918-205
Tropfschale grün, Waschlotion	1	00-918-205GR
Tropfschale blau, Händedesinfektion	1	00-918-205BL
Tropfschale gelb, Hautpflege	1	00-918-205GE
Tropfschale rot, Hautschutz	1	00-918-205RO
Bohrschablone	1	ZUB-918005

RX5T	VE	Art. Nr.
Kunststoffspender RX5T	1	00-911-005RXT
Einwegpumpe Kunststoff	1	00-901-505-RX5M
Tropfschale weiss, universell	1	00-911-205RXT
Tropfschale grün, Waschlotion	1	00-911-205RXTGR
Tropfschale blau, Händedesinfektion	1	00-911-205RXBL
Tropfschale gelb, Hautpflege	1	00-911-205RXTGE
Tropfschale rot, Hautschutz	1	00-911-205RXTRO

SPE ALU FLEX	VE	Art. Nr.
Wandspender SPE ALU FLEX	1	00-907-KOMB
ESH-Adapter für SPE ALU FLEX	1	00-907-KOMB-01
Verschlussblende für SPE ALU FLEX	1	00-907-KOMB-02
Flaschenklemme für 500 ml Flaschen	1	00-907-KOMB-03
Einweg-Kunststoffpumpe für SPE, 500 ml	1	00-918-105
Einweg-Kunststoffpumpe für SPE, 1 L	1	00-918-110
Tropfschalenwinkel	1	00-907-KOMB-04
Tropfschale weiß, universell	1	00-918-205
Tropfschale grün, Waschlotion	1	00-918-205GR
Tropfschale blau, Händedesinfektion	1	00-918-205BL
Tropfschale gelb, Hautpflege	1	00-918-205GE
Tropfschale rot, Hautschutz	1	00-918-205RO
Bohrschablone	1	ZUB-907000

PFLICHTANGABEN NACH § 4 HEILMITTELWERBEGESETZ (HWG)

ASEPTOMAN® PARFÜMFREI

63,14 g 2-Propanol pro 100 g, Lösung zur Anwendung auf der Haut. Alkoholische Händedesinfektion.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 63,14 g 2-Propanol. Sonstige Bestandteile: Butan-1,3-diol, Lanolin-poly(oxyethylen)-75, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Wirkpektrum: bakterizid, mykobakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid*.

*Ergebnisse aus In-Vitro-Versuchen gegen BVDV und Vaccinia-Virus lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z. B. HBV / HIV, HCV.

Gegenanzeigen: Nicht auf der Schleimhaut oder im Augenbereich anwenden. Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (z. B. Rötung und Brennen) kommen. Auch Kontaktallergien sind möglich.

Warnhinweise: Enthält Wollwachs. Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Alkoholhaltig, brennbar. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen.

Flammpunkt: 23 °C. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden.

Stand der Information: 08/2023

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, T +49 5664 9496-0, info@schumacher-online.com

ASEPTOMAN® DUO

50 g 1-Propanol, 20 g 2-Propanol pro 100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 50 g 1-Propanol, 20 g 2-Propanol. Sonstige Bestandteile: Triglyceride, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS (zusätzlich Adeno-, Noro- und Rotaviren).

Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nicht auf Schleimhäuten oder im Augenbereich anwenden.

Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötung, Brennen) kommen. In diesem Fall sind die Hautschutzmaßnahmen zu verstärken. Auch Kontaktallergien sind möglich.

Warnhinweise: Entzündlich. Von Zündquellen fernhalten! Die Flasche fest verschlossen halten und vor Hitze geschützt aufbewahren. Bei Anwendung nicht rauchen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der Lösung, Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Stand der Information: 10/2025

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, T +49 5664 9496-0, info@schumacher-online.com

ASEPTOMAN® VIRAL

Alkoholische Händedesinfektion zur Anwendung auf der Haut

Wirkstoffe: 10 g 1-Propanol und 57,6 g Ethanol 96 % pro 100 g Lösung.

Zusammensetzung: Wirkstoffe: 100 g Flüssigkeit enthalten: 10 g 1-Propanol (Ph. Eur.), 57,6 g Ethanol 96 %. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Propylenglycol, Butan-1,3-diol, Glycerol, 2-Butanon, Phosphorsäure 85 %, Lanolin-poly(oxyethylen)-75. Enthält Wollwachs und 1,8 g/100 g Propylenglycol.

Anwendungsgebiete: Hygienische Händedesinfektion.

Wirkpektrum: bakterizid (inkl. Mykobakterien), levurozid, viruzid.


Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Allergie gegen die Wirkstoffe oder gegen einen der sonstigen Bestandteile.

Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (z. B. Austrocknung, Schuppung, Rötung, Spannung, Juckreiz) kommen. Bei hochfrequenter Anwendung kann es zu weitergehenden Hautreizungen mit oberflächlichen Defekten kommen. Ausmaß und der Schweregrad hängen direkt mit der Häufigkeit der Anwendung und der Durchführung angemessener Hautpflegemaßnahmen zusammen. Bei dem ersten Auftreten von Hautirritationen sind die Hautpflegemaßnahmen zu intensivieren.

Warnhinweise: Zur Anwendung auf Schleimhäuten, im Augenbereich und offenen Wunden nicht geeignet. Bei versehentlichem Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten sofort gründlich mit viel Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Nicht verschlucken oder in den Blutkreislauf gelangen lassen. Aseptoman viral ist alkoholhaltig und brennbar. Vor Anwendung elektrischer Geräte die mit Aseptoman viral eingeriebene Haut gut trocknen lassen. Enthält Wollwachs. Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen. Stand der Information: 06/2024

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, T +49 5664 9496-0, info@schumacher-online.com

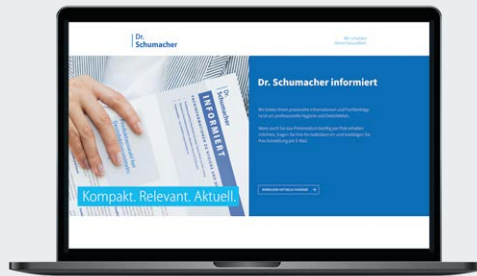

Kompakt. Relevant. Aktuell.

DR. SCHUMACHER INFORMIERT

**AKTUELLE INFORMATIONEN UND FACHBEITRÄGE
RUND UM PROFESSIONELLE HYGIENE UND DESINFEKTION.**



JETZT INFORMIEREN UND ABONNIEREN

dsi.schumacher-online.com

Kontakt

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld
Germany
T +49 5664 9496-0
F +49 5664 8444
info@schumacher-online.com
www.schumacher-online.com

